

Invacare® | *Softform Premier Active 2*

NOUVEAU



Cumulez les avantages d'un matelas statique et dynamique !

Le matelas *Invacare Softform Premier Active 2*, testé cliniquement et breveté, est aussi bien destiné au domaine hospitalier, aux diverses collectivités qu'au domicile.

Il procure au patient un excellent niveau de prévention et de confort y compris pour des patients ayant des escarres de stade 1 à 3.

La conception de ce matelas est unique : une couche de cellules à air entre deux couches de mousse dont la surface supérieure est crénelée (plots) afin de fournir au patient un bien-être optimal et ainsi réduire les points de pression. Peut être utilisé avec ou sans compresseur. Ce système innovant permet d'éviter le transfert du patient en cas de dégradation de sa pathologie et lui apporte un confort maximal tout en combinant les avantages du matelas statique et les bénéfices de l'air.



Yes, you can.®



Un matelas dynamo-statique

Ce matelas, sur le modèle du matelas Invacare **Softform Premier 120**, offre les propriétés d'un matelas statique à haut risque. Si l'état du patient nécessite le recours à une surface dynamique, un compresseur automatique, très facile d'utilisation, peut être installé.

Un compresseur digital

Actionnées par un compresseur innovant équipé d'un capteur de pression qui ajuste automatiquement la pression en fonction du poids du patient, les cellules à air, dont chacune est amovible, alternent selon un cycle d'une sur deux toutes les 10 minutes. Ceci permet d'augmenter de manière significative le confort du patient et de réduire l'impact négatif de la pression sur les vaisseaux sanguins.

Une housse bi-extensible

Sa housse Dartex, dont les coutures sont soudées, est bi-extensible. Elle prévient les risques de maladies nosocomiales et

réduit les risques potentiels de friction et de cisaillement.

Caractéristiques et Options



Lors de l'installation du compresseur, détachez le tuyau de l'extrémité du pied du matelas.



Reliez le tuyau au compresseur.



Pour activer le compresseur, il faut presser le bouton « on ». Aucun ajustement supplémentaire n'est nécessaire.



Le patient est maintenant installé sur une surface dynamique dont les cellules alternent, selon un cycle d'une sur deux, toutes les 10 minutes.

Caractéristiques et Options



Le compresseur dispose d'un écran LCD ainsi que d'une alarme audio.



L'écran LCD du compresseur donne des informations précises sur le compresseur en cours d'utilisation.




La conception unique des cellules à air permet une bonne répartition du poids (breveté).



Les informations de l'écran LED sont disponibles en 9 langues différentes.



En cas de détérioration, les cellules à air peuvent être remplacées indépendamment.

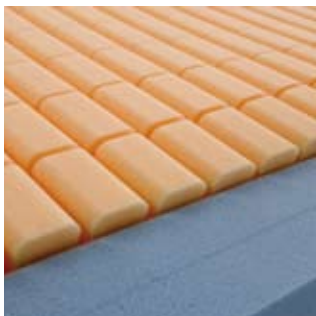

Les crénelures de la partie supérieure du matelas réduisent la pression.



Les crochets du compresseur ont été conçus pour s'adapter à la plupart des lits.



Un matelas à air composé de cellules en nylon est intégré entre les deux couches en mousse du **Softform Premier** afin de passer d'une surface statique à dynamique. Ce système permet de maintenir le patient sur le même matelas et lui apporte ainsi un confort maximal.



Le tuyau reliant le matelas au compresseur est protégé sur toute sa longueur, il peut donc être facilement désinfecté afin de prévenir le risque de maladies nosocomiales.



Le matelas **Invacare Softform Premier Active 2** possède une housse Dartex bi-extensible et imperméable.




En cas de panne de courant, le patient repose toujours sur une surface réduisant la pression, minimisant les risques d'escarres. (Idéal en HAD et à domicile)




La conception modulaire du matelas facilite le remplacement des pièces détachées et allonge la durée de vie du matelas.

Caractéristiques Techniques


Softform Premier Active 2

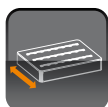

Largeur:
880 mm

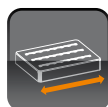

Longueur:
1970 mm

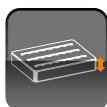

Hauteur:
152 mm



Poids:
14 kg



Poids Max. Utilisateur:
247.6 kg



Housse lavable
à 80°C

Lavage quotidien
en utilisant
des lingettes
désinfectantes.

Compresseur :

32Db
Cycles : 10 minutes. Alternance d'une cellule sur deux.

Normes :

NF EN 597-1
NF EN 597-2
BS7177 : 1996 Crib 5.

Code produit:

1552613 (matelas)

1549002 (compresseur)

Garantie:


- Mousse: 8 ans
- Housse: 4 ans
- Cellules à air: 2 ans
- Compresseur: 2 ans

Références cliniques :

British Journal of Nursing 2006 : Softform Premier Active Mattress : a novel step-up/step down approach, *Geoff Thompson*.

Wounds UK 2008: A clinical audit of the Softform Premier Active mattress in two acute care of the elderly wards, *David Gray, Pam Cooper, Melvyn Bertram, Kirsten Duguid, Gail Pirie*.

Coloris

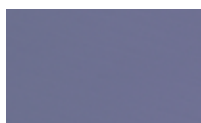

Bleu Océan

Invacare Poirier S.A.S.
Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tel. : +33 2 47 62 64 66
Fax : +33 2 47 42 12 24
Email : contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

© 2011 Invacare International Sàrl
Tous droits réservés.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle).
Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.

Softform Premier Active 2 - FR -
12/2011



Yes, you can.®