



scalamobil®



Franchissez les escaliers. Renforcez la sécurité.

scalamobil – l'aide mobile pour franchir les escaliers
simplement et en toute sécurité.



www.alber.de/fr



scala, c'est vous qui décidez.

Si la mobilité quotidienne devient un problème en raison d'une maladie ou d'un accident, les escaliers constituent souvent un obstacle insurmontable. Il arrive donc que des étages entiers d'une maison restent inutilisés ou que la personne concernée doive envisager de quitter son domicile. De plus, les aidants et les proches peuvent avoir du mal à faire face à la situation. Les solutions de mobilité fixes nécessitent des rénovations compliquées et coûteuses et ne sont pas toujours adaptées à tous les types d'escaliers.

Grâce au scalamobil, les contraintes liées aux escaliers appartiennent au passé. Aucune modification structurelle n'est nécessaire pour utiliser ces aides à la montée polyvalentes, qui sont compatibles avec tous les types d'escaliers.

Les personnes concernées et leurs proches profitent également de cette nouvelle liberté et peuvent à nouveau vaquer à leurs occupations quotidiennes en toute indépendance et liberté.

scalamobil est fait pour vous si :

- ✓ vous devez accéder aux étages supérieurs de votre maison.
- ✓ vous voulez assurer la sécurité des utilisateurs de fauteuils roulants et de leurs aidants.
- ✓ vous recherchez une solution de mobilité qui ne nécessite aucune modification structurelle.
- ✓ vous préférez une aide au franchissement d'escaliers qui vous permette de rester dans votre fauteuil roulant.
- ✓ vous avez besoin d'une aide au franchissement d'escaliers mais ne dépendez pas d'un fauteuil roulant pour votre usage quotidien.
- ✓ la convivialité est importante pour vous et vous souhaitez alléger la charge de vos aidants et de vos proches.



Un foyer dans la force de l'âge



SECURITE

fiable & intelligent

La sécurité et la facilité d'utilisation sont les principales caractéristiques des modèles scala. Grâce à leur technologie simple et éprouvée, ces aides à la mobilité inspirent confiance, et leur utilisation devient un jeu d'enfant. Vous vous habituerez rapidement à utiliser les aides à la mobilité en toute confiance, ce qui vous soulagera immédiatement dans votre vie quotidienne.

Grâce à la surveillance automatique de l'inclinaison et à de nombreuses autres fonctions intelligentes, la sécurité est assurée dans tous les types d'escaliers.

- ✓ **Stabilité** : Repose-pieds et accoudoirs solides
- ✓ **Contrôle** : Unité de commande intuitive
- ✓ **Polyvalence** : Différents modes de conduite intelligents, un antidémarrage et un interrupteur d'arrêt d'urgence



MOBILITE

polyvalent et adaptable

L'aide mobile au franchissement d'escaliers convient à tous les types d'escaliers et peut être adaptée aux besoins individuels des utilisateurs et des aidants. Un véritable enrichissement de votre vie quotidienne vous attend.

scalamobil se démonte en deux parties d'une seule main et se fixe facilement sur presque tous les types de fauteuils roulants. scalacombi est équipé d'un mode franchissement d'obstacles ainsi que d'accoudoirs et de repose-pieds rabattables - pour vous permettre de relever tous les défis de la vie quotidienne.

- ✓ **Installation** : Prêt à être utilisé sur de nombreux types d'escaliers, sans modifications
- ✓ **Flexibilité** : scalacombi impressionne par sa facilité de pliage

CONFORT

confortable & chic

Lors du développement des nouveaux modèles scalamobil, la priorité a été donnée à la facilité d'utilisation pour les aidants. Le siège large et stable est recouvert d'un matériau souple mais offrant un bon soutien pour un confort optimal.

La fonction soft step dynamique permet de franchir les escaliers en douceur, avec un mouvement régulier. Esthétiquement, les modèles scalamobil et scalacombi s'intègrent parfaitement dans la maison. Leur design minimaliste et clair crée un aspect général de haute qualité.

- ✓ **Confortable** : Franchit en douceur les escaliers grâce à la fonction soft-step
- ✓ **Qualité** : Fabrication de haute qualité
Fabriqué en Allemagne
- ✓ **Apparence** : Design attrayant

Facile à ranger
et à démonter
pour le transport.





ESCALIERS


Prend les escaliers au sérieux. Et la vie facile.

Contrairement aux monte-escaliers, les dispositifs mobiles du franchissement d'escaliers Alber ne nécessitent aucune modification structurelle de votre maison.


Cela permet de gagner du temps, d'avoir l'esprit tranquille et d'offrir une solution rapide et flexible. Ces appareils conviennent à tous les types d'escaliers et sont compatibles avec presque tous les types d'escaliers, y compris les escaliers

étroits, raides ou en colimaçon. Grâce à leur conception compacte et leur facilité de pliage, ces aides à la montée d'escaliers sont idéales pour les déplacements.


Ainsi, les escaliers peuvent être franchis facilement, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la maison.

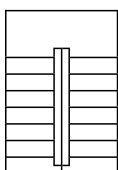


Hauteur de marche jusqu'à 20 cm

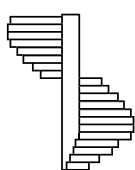

Escalier en colimaçon

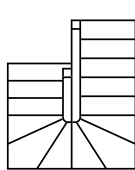

Escaliers étroits

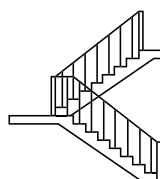

Escaliers extérieur avec garde-corps

Aucune rénovation nécessaire, quel que soit le type d'escalier


LES VERSIONS

scalamobil®**Arrimage au fauteuil**

scalamobil peut être fixé à presque tous les types de fauteuils rapidement et sans outils.

Les utilisateurs de fauteuils roulants peuvent ainsi rester assis et franchir facilement les obstacles à leur domicile ou en déplacement.

- i** scalamobil peut également être combiné avec des fauteuils roulants pédiatriques ou particulièrement étroits

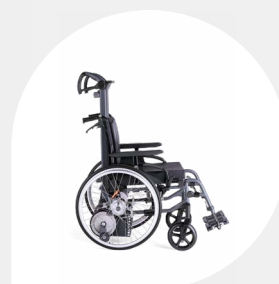**scalacombi®****Avec siège intégré**

scalacombi est idéal pour les personnes qui ont besoin d'une assistance pour franchir les escaliers, mais qui n'ont pas besoin d'un fauteuil roulant dans leur vie quotidienne. Le dispositif est doté d'un siège intégré confortable et peut être plié et rangé pour gagner de la place.

**Également inclus dans la livraison :****Batterie**

Autonomie jusqu'à 200 marches

**Chargeur automatique**

Chargement et arrêt automatiques intelligents

**Guidon avec écran**

Guidon réglable en largeur et hauteur pour une utilisation ergonomique

ECRAN

Bien en main.

Concept de fonctionnement intelligent pour la sécurité et le confort.



L'assistant de maintien d'inclinaison indique si le scalamobil est dans la bonne position.



Mode Obstacle :

La fonction de franchissement d'obstacles permet de franchir des seuils de portes.



Verrouillage :

Le dispositif d'immobilisation protège contre toute utilisation non autorisée.



On/off:

Interrupteur principal pour la mise en marche et l'arrêt.

AUTO

En mode automatique, le sens de franchissement est détecté par des capteurs et déclenché automatiquement.

ASSISTANCE

La montée est assistée lorsque l'appareil est dans la bonne position et que le bouton "montée/descente" est enclenché.


MANUEL

En mode manuel, le franchissement des escaliers est possible dans toutes les situations, car les fonctions des capteurs sont désactivées.



Affichage clair indiquant les informations de la batterie et la direction.

LARGEUR & HAUTEUR

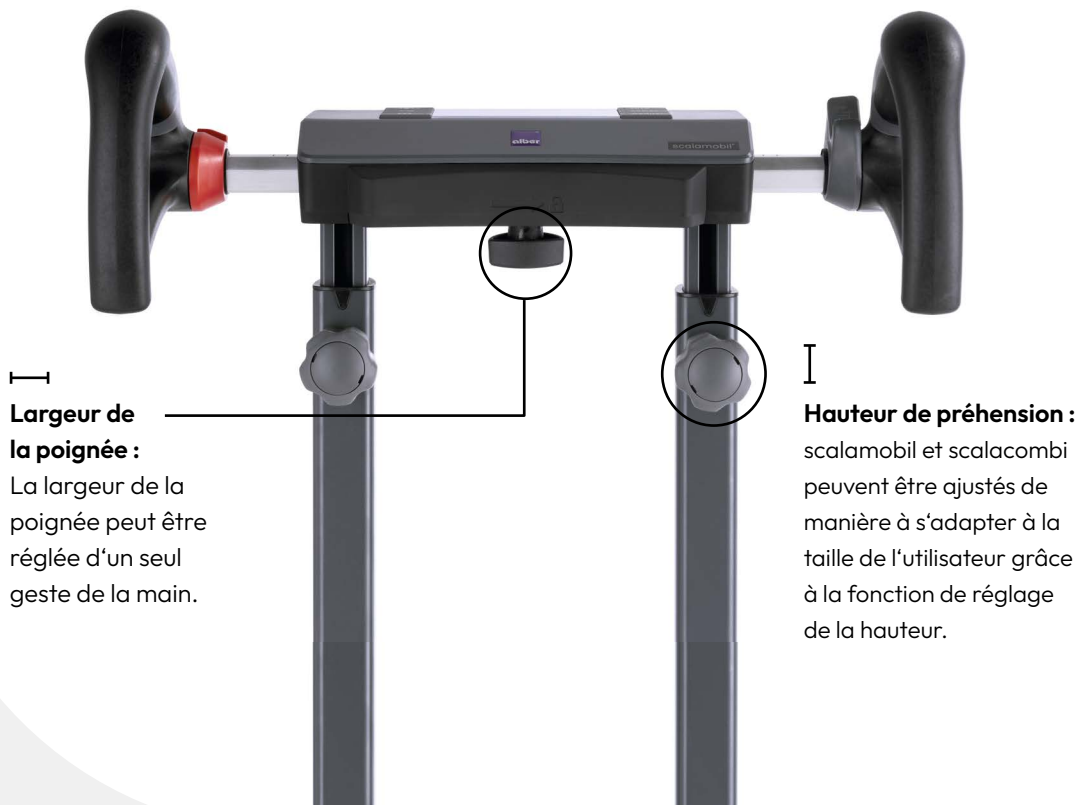

Largeur de la poignée :
La largeur de la poignée peut être réglée d'un seul geste de la main.

Hauteur de préhension :
scalamobil et scalacombi peuvent être ajustés de manière à s'adapter à la taille de l'utilisateur grâce à la fonction de réglage de la hauteur.

CAPTEURS

Pour la sécurité. Bien sûr.


La sécurité est une priorité absolue lorsqu'il s'agit d'utiliser et de faire fonctionner des dispositifs scala. De nombreuses fonctions ingénieuses garantissent des montées et des descentes en toute sécurité. Les capteurs intégrés collectent et traitent toutes les informations nécessaires en temps réel.

Arrimage :

Lors de l'utilisation du modèle scalamobil, vous devez enlever les roues du fauteuil roulant pendant le franchissement.

Capteurs pendant le processus de franchissement :

Pour le confort d'utilisation, la fonction soft step dynamique est l'une des fonctions les plus importantes de la nouvelle génération de scala. Elle fonctionne en réduisant individuellement et automatiquement la vitesse avant le contact avec chaque marche. Des capteurs intégrés dans le dispositif de montée d'escalier mesurent la hauteur de la marche, ce qui permet d'adapter le processus de franchissement de manière optimale et en douceur.

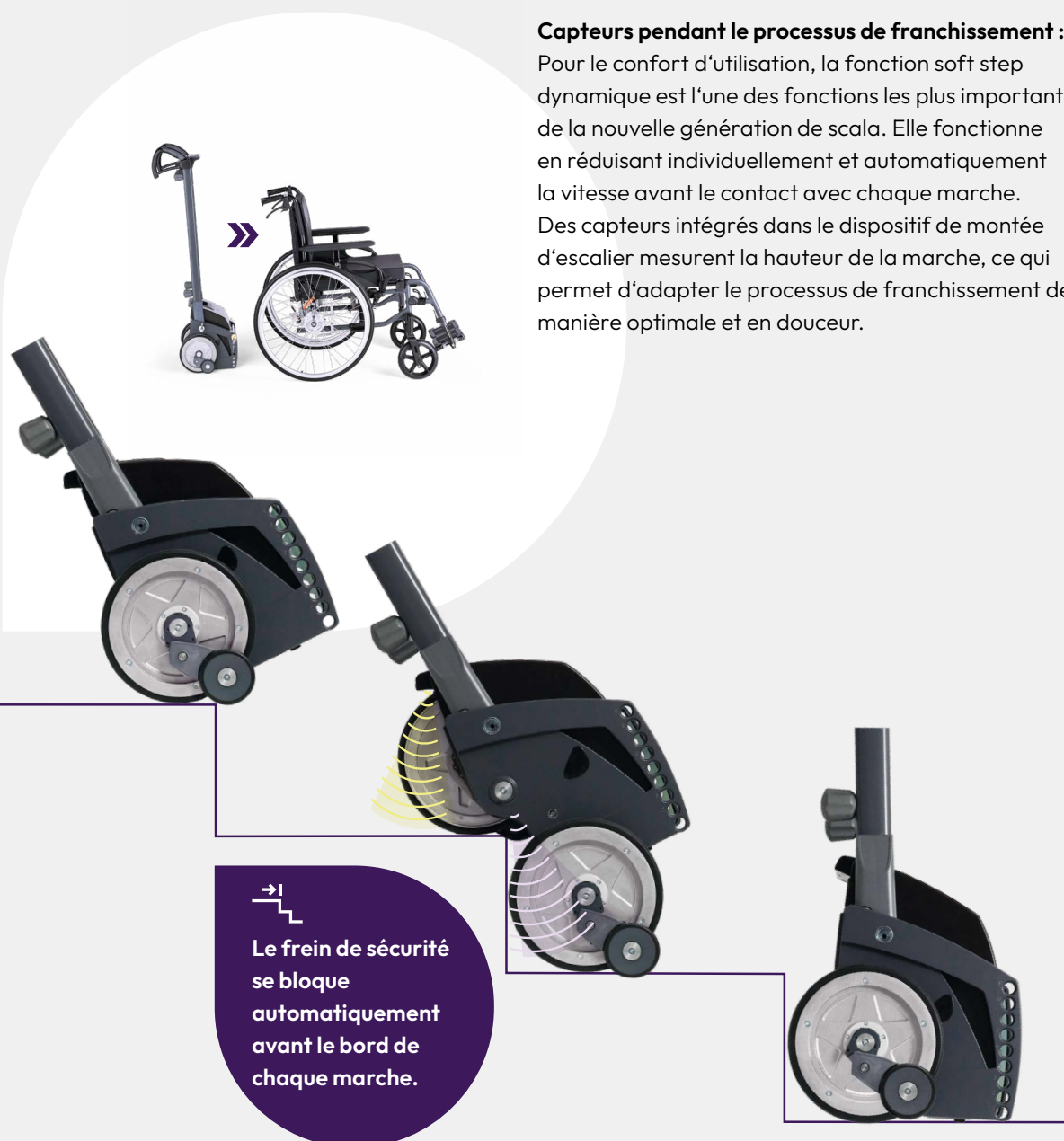

Le frein de sécurité se bloque automatiquement avant le bord de chaque marche.



Données techniques

	scalamobil S45	scalacombi S46
Poids		
Global	26 kg	37 kg
Poids max utilisateurs	140 kg	140 kg
Poids global autorisé	180 kg (scalamobil, fauteuil et utilisateur)	
Marches	Jusqu'à 200 marches	
Vitesse	Environ 12 marches par minute	
Batterie	2x12 V ; 3,4 Ah plomb gel, étanche et sans entretien	



scalamobil – l'aide mobile pour franchir les escaliers de manière simple et et en toute sécurité.

scalamobil et scalacombi portent le marquage CE de conformité au règlement européen sur les dispositifs médicaux (MDR) 2017/745, ont été testés sur une base volontaire par TÜV Süd et sont certifiés selon la norme de produit EN 7176-28. Notre engagement qualité - votre sécurité !

Alber est certifié selon la norme actuelle de gestion de la qualité ISO 13485 pour les dispositifs médicaux. Notre système de gestion de l'environnement, certifié ISO 14001, garantit que nos produits sont fabriqués dans le respect de l'environnement.



Invacare Poirier SAS

Route de Saint Roch
37230 Fondettes France
Tél : +33 2 47 62 64 00
contactfr@invacare.com

FABRIQUE EN ALLEMAGNE ■■■