
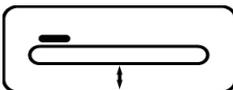
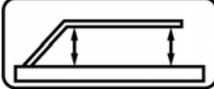


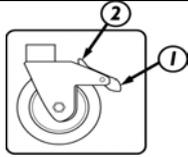

## FICHE DE SUIVI Invacare® SB 440

### Fonctionnement du lit

<b>Réglage du relève-buste – fonction électrique</b> Régler l'inclinaison du relève-buste en utilisant les boutons Haut/Bas de la télécommande.	
<b>Réglage de la hauteur variable – fonction électrique</b> Régler la hauteur du lit en utilisant les boutons Haut/Bas de la télécommande.	
<b>Réglage du relève-jambe – fonction manuelle</b> Pour le lever : prendre le relève-jambe en pied et le soulever à la hauteur souhaitée. Pour le descendre : prendre le relève-jambe, le soulever entièrement et le baisser.	
<b>Réglage du relève-jambe – fonction Electrique</b> Régler l'inclinaison de la plicature combinée avec le relève-jambes en utilisant les boutons Haut/Bas de la télécommande.	
<b>Frein – fonction manuelle</b> ①. Freinage : appuyer sur le frein avec le pied. ②. Libération du frein : appuyer sur le levier de déverrouillage avec le pied.	
<b>Freinage centralisé</b> ①. Freinage : appuyer sur la pédale de frein , coté rouge, avec le pied. ②. Libération du frein : appuyer sur la pédale de frein , coté vert, avec le pied.	

### Maintenance et Entretien

**L'entretien et la maintenance du lit ne peuvent être effectués que par un personnel ayant reçu les instructions ou la formation nécessaires.**

Nous conseillons d'effectuer un **contrôle annuel d'entretien** du lit en vérifiant les points suivants :

- ✓ Contrôler l'installation du lit : le lit doit être monter conformément aux indications mentionnées dans le manuel d'utilisation. Rappeler les consignes de sécurité au Patient et à la tierce personne.
- ✓ Vérifier l'aspect général du lit. Faire fonctionner tous les moteurs afin de détecter tout bruit suspect.
- ✓ Contrôler le montage des barrières et le verrouillage/mouvement.
- ✓ Contrôler le montage et le système de freinage des roues. (freinage centralisée ou freinage indépendant sur chaque roulette)
- ✓ Contrôler le montage du plan de couchage et des panneaux.
- ✓ Contrôler le moteur de hauteur variable et ses performances.
- ✓ Contrôler le moteur du relève-buste et ses performances.
- ✓ Contrôler le moteur de la plicature et ses performances.
- ✓ Vérifier que les cordons électriques et les fiches ne soient pas endommagés.
- ✓ Contrôler la crémaillère (système rastofix) et son fonctionnement.
- ✓ Vérifier les soudures.
- ✓ Lubrification à effectuer : Points de rotation dans le plan de couchage et le cadre inférieur avec de l'huile, tringlerie de l'ensemble des moteurs avec de l'huile. Lubrifier avec une huile de nettoyage médicale.



