






## Notice d'utilisation du kit de transport et de stockage – Lit assemblé (SB 400)

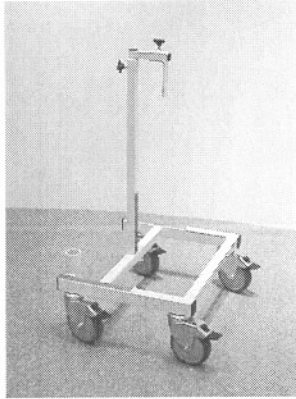


Kit de transport et stockage.  
Réf : 021959.D0

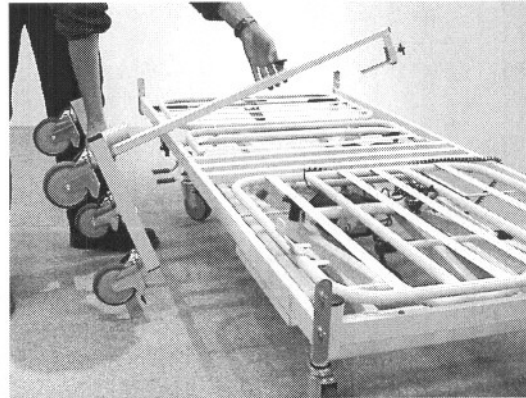


Le kit (roues bloquées) se pose sur le lit, qui doit être en position basse.

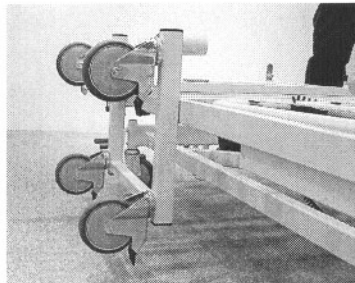


Placer le kit de sorte qu'il soit calé contre le plan de couchage.

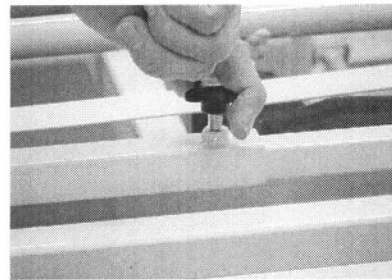


Ajuster la position du tube télescopique à la largeur du lit, et visser fermement.

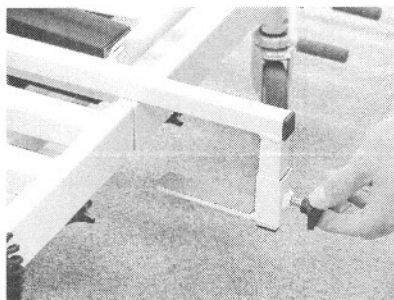


Bien ajuster la patte supérieure et visser fermement, afin de caler le tube télescopique contre le lit.

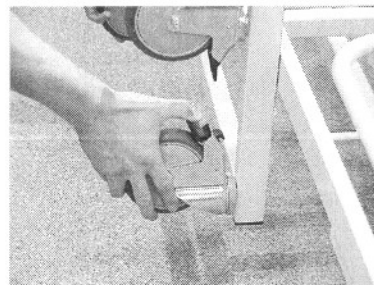

S'assurer que les roues soient toutes bien bloquées.

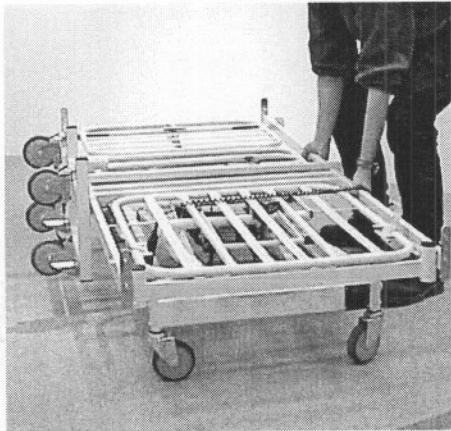


Le lit peut à présent être soulevé...

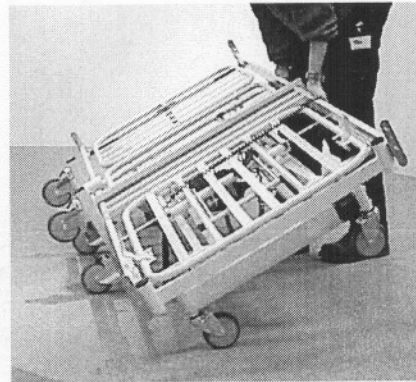

...jusqu'à la verticale.



Vous pouvez maintenant placer les panneaux, la potence, et les barrières sur le kit de transport.

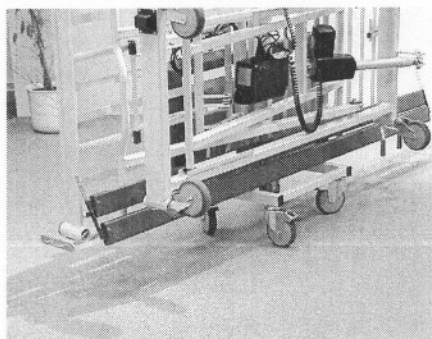

Kit équipé prêt au transport.

Invacare® EC-Høng  
Ident. nr. 1415781  
Version 02 02.2001