




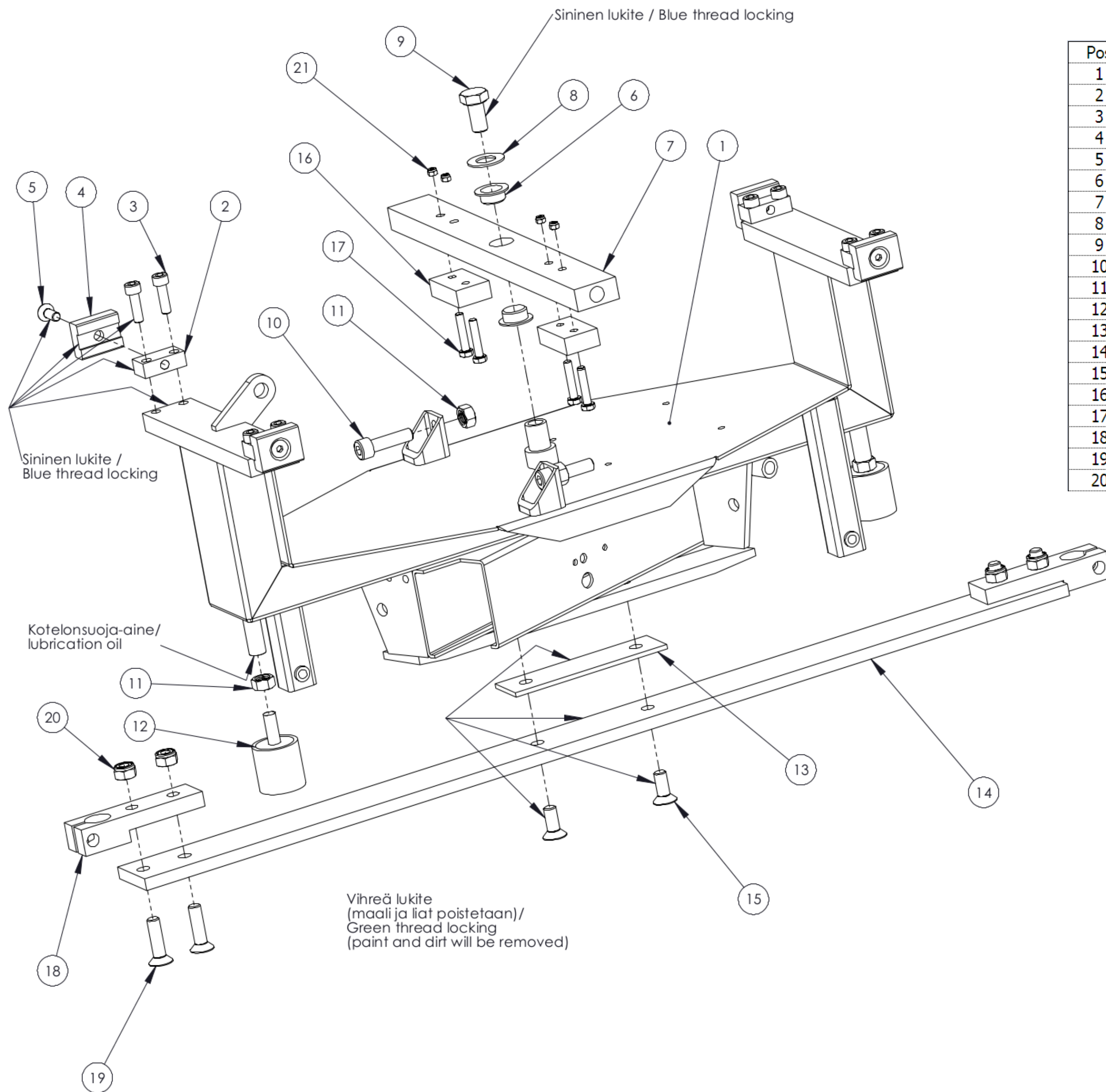


Pos	QTY	Inv_Number	Description
1	1	1574326	Chassis
2	4	1574327	Support de coulisse
3	8	1574328	Vis
4	4	1574333	Coulisse
5	4	1574334	Vis
6	2	1574336	Roulement
7	1	1574337	Barre de liaison
8	1	1574338	Rondelle
9	1	1574339	Vis
10	2	1574365	Vis
11	4	1574366	Ecrou
12	2	1574367	Coussin 40*30
13	1	1574368	Rondelle
14	1	1574369	Lame de ressort inférieure
15	2	1574370	Vis
16	2	1547371	Barre de liaison
17	4	1547372	Vis
18	2	1547373	Support lame de ressort
19	4	1547374	Vis
20	4	1547375	Ecrou frein

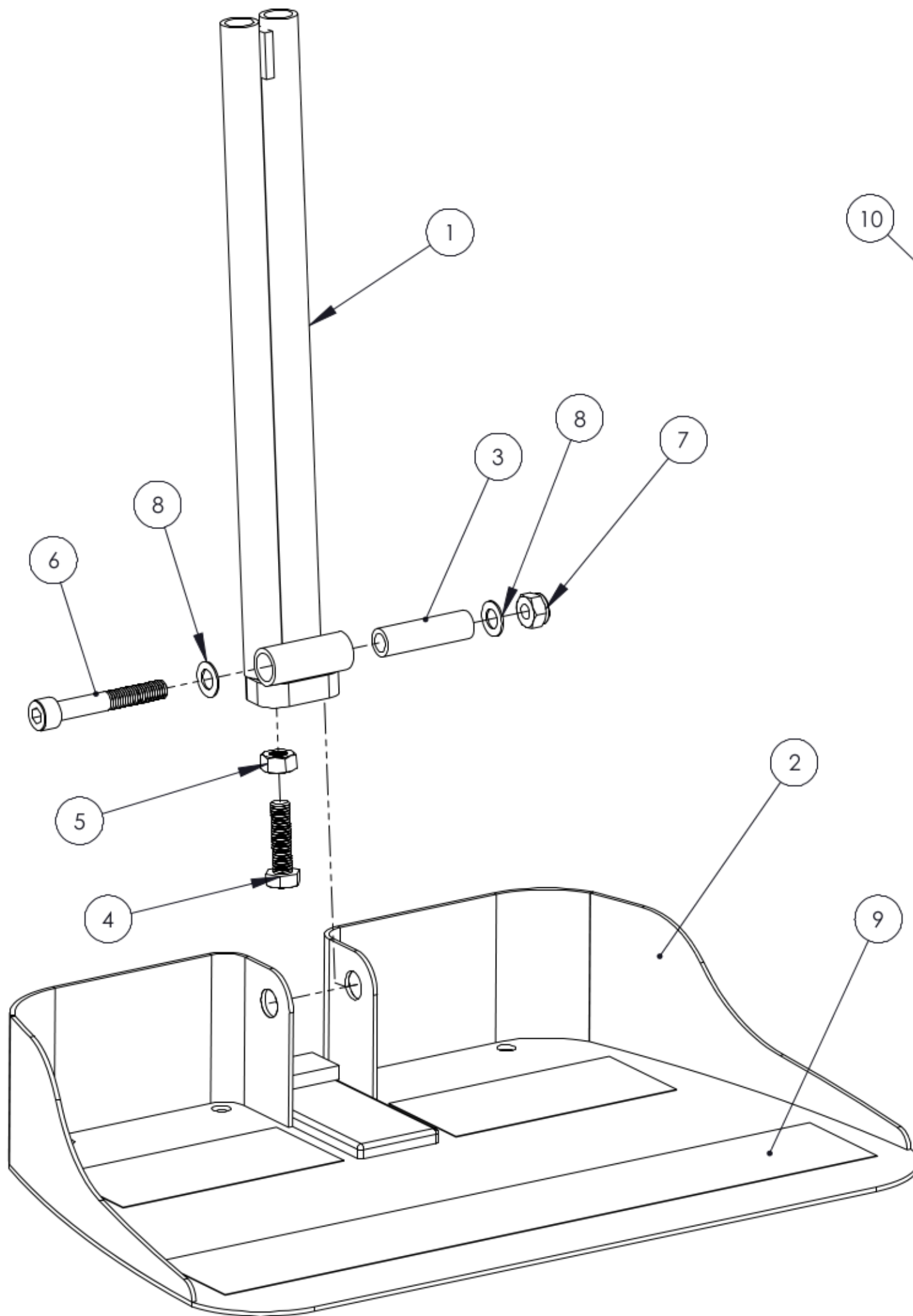


1	1	1574627	Tube repose-pieds
2	1	1574620	Palette
3	1	1574551	Entretoise
4	1	1575704	Entretoise
6	1	1575672	Vis
8	2	1575154	Rondelle
9	1	1575101	Cassette
10	1	1574847	Palette City

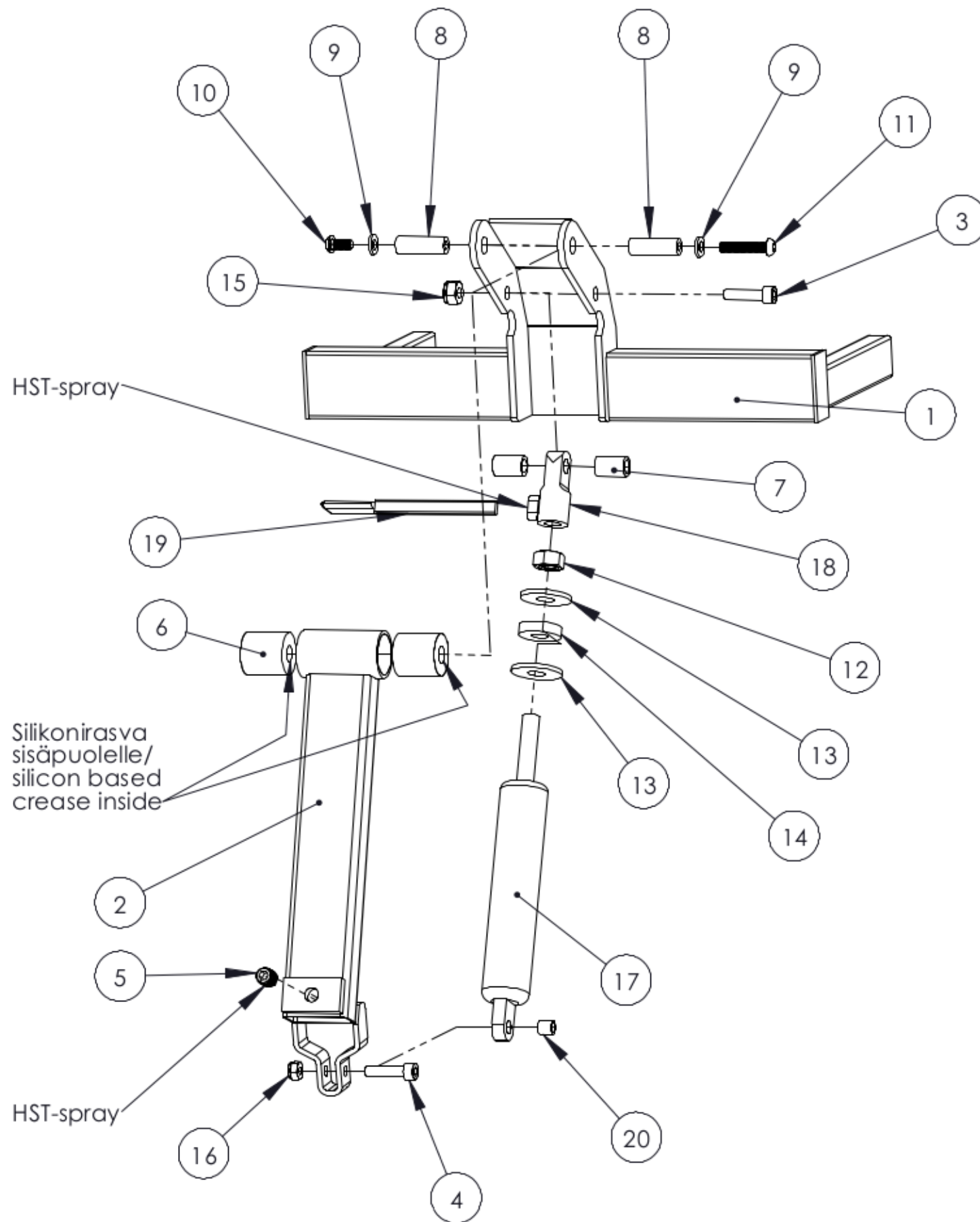


1	1	1574616	Support de repose-jambe
2	1	1574608	Bras de repose-jambe
3	1	1575673	Vis
4	1	1575544	Vis
5	1	1575675	Vis
6	2	1574534	Bague caoutchouc
7	2	1574535	Entretoise
8	1	1574536	Entretoise
9	1	1575141	Rondelle
10	1	1575841	Vis
11	1	1575843	Vis
12	1	1575708	Ecrou
13	2	1575138	Rondelle
14	1	1574537	Bague caoutchouc
17	1	1574906	Vérin gaz
18	1	1574725	Tête de vérin gaz
19	2	1574726	Levier
20	2	1574593	Entretoise

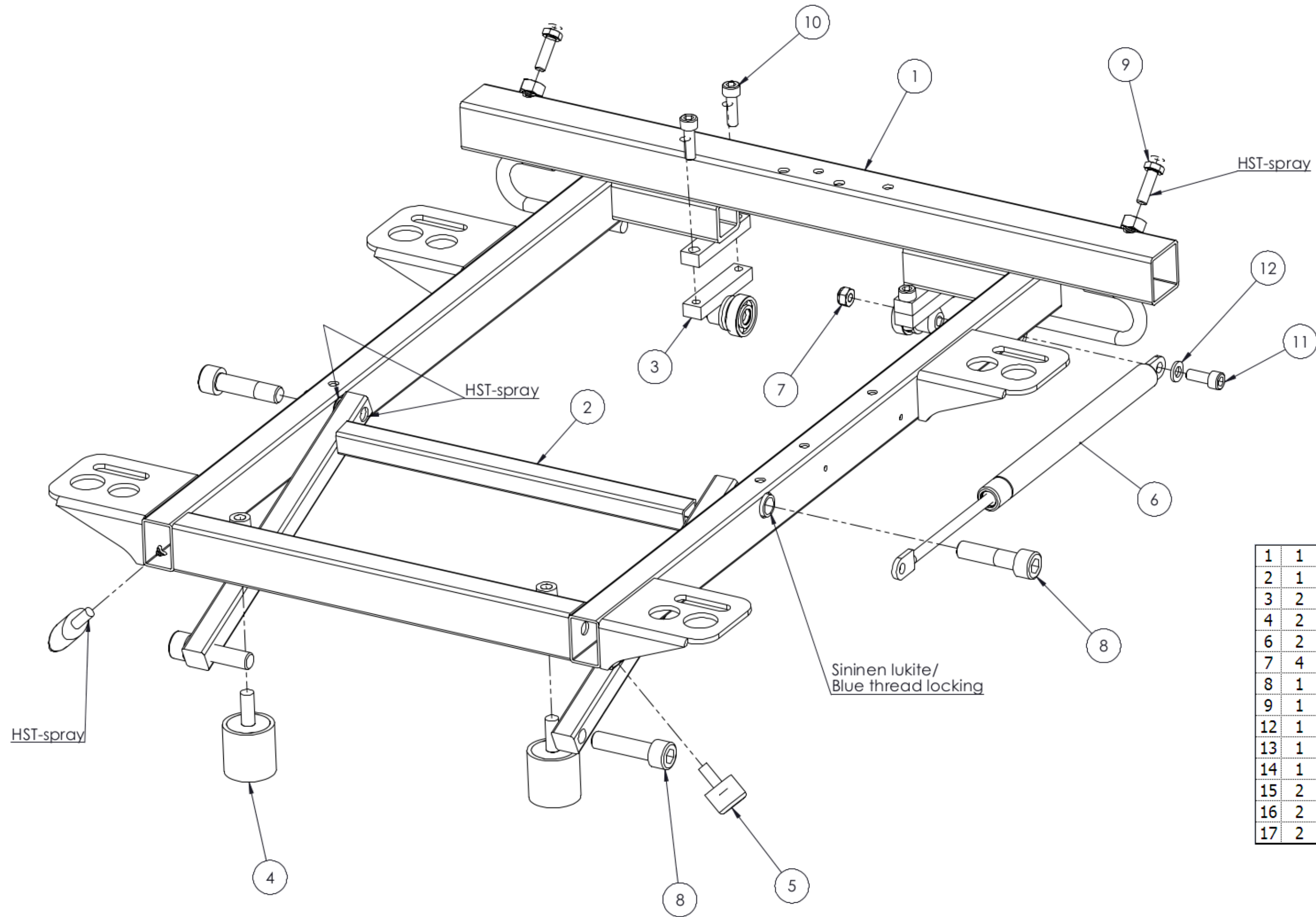


1	1	1574525	Cadre d'assise
2	1	1574530	Barre de liaison d'assise
3	2	1574532	Support de roulement
4	2	1575114	Coussin 30*30
6	2	1575703	Vis
7	4	1575662	Vis
8	1	1574480	Vérin gaz
9	1	1575547	Vis
12	1	1574523	Plaque
13	1	1574514	Support
14	1	1574524	Support 2
15	2	1575196	Vis
16	2	1575143	Rondelle M4
17	2	1575742	M4 Ecrou frein

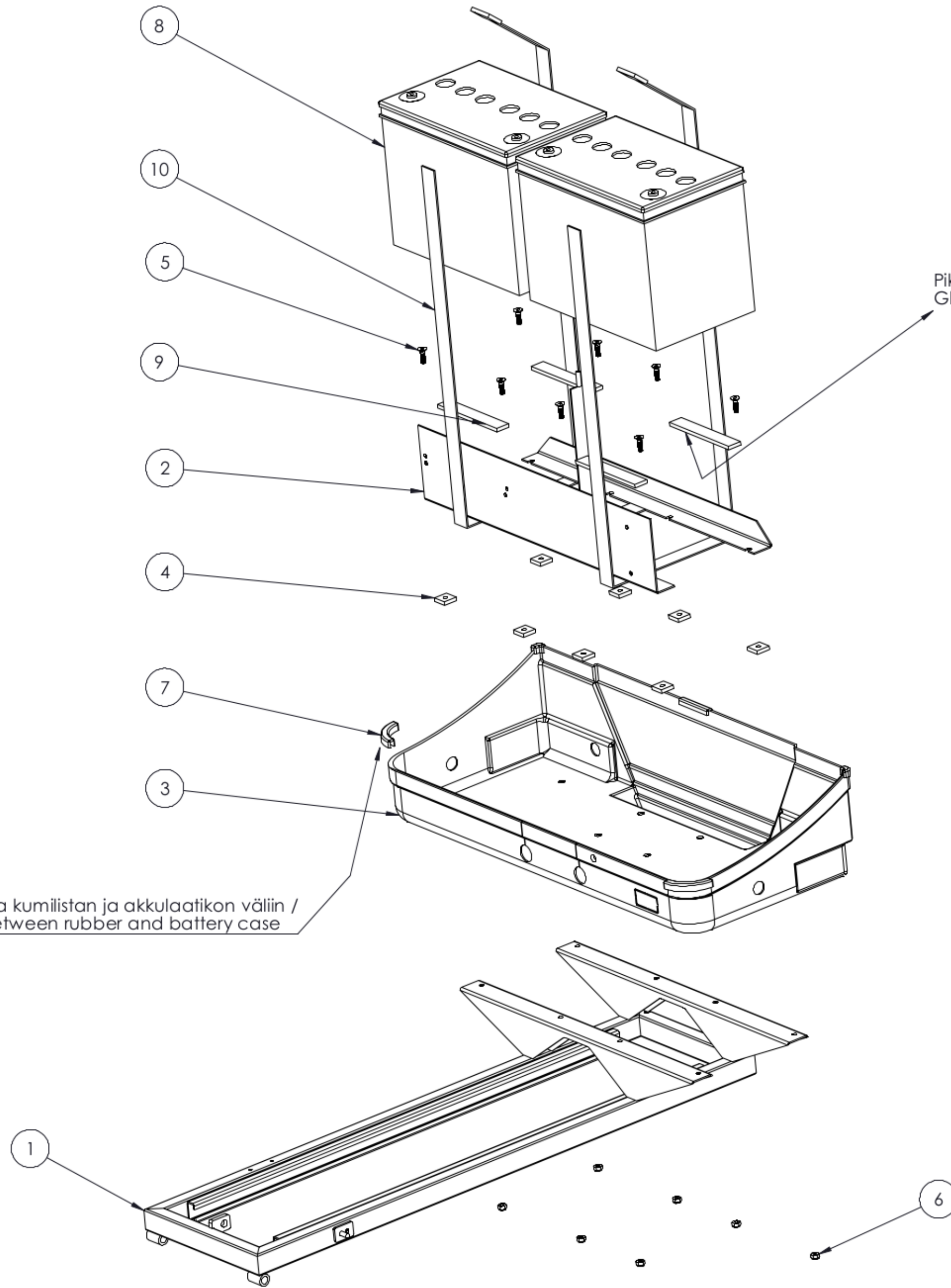


1	1	1574506	Support
2	2	1575839	Vis
3	1	1575100	Vérin
4	4	1574481	Coulisse plastique
5	2	1575739	Ecrou frein
6	1	1575549	Vis
7	1	1574451	Vérin gaz
1	1	1574511	Chassis support bac batterie
2	1	1574512	Support batteries
3	1	1574722	Bac batterie inférieur
4	8	1574507	Rondelle plastique
5	8	1575341	Vis
7	2	1574508	Caoutchouc
8	2	1575952	Batterie Gel
9	4	1574510	Caoutchouc
10	2	1574947	Sangle de batterie

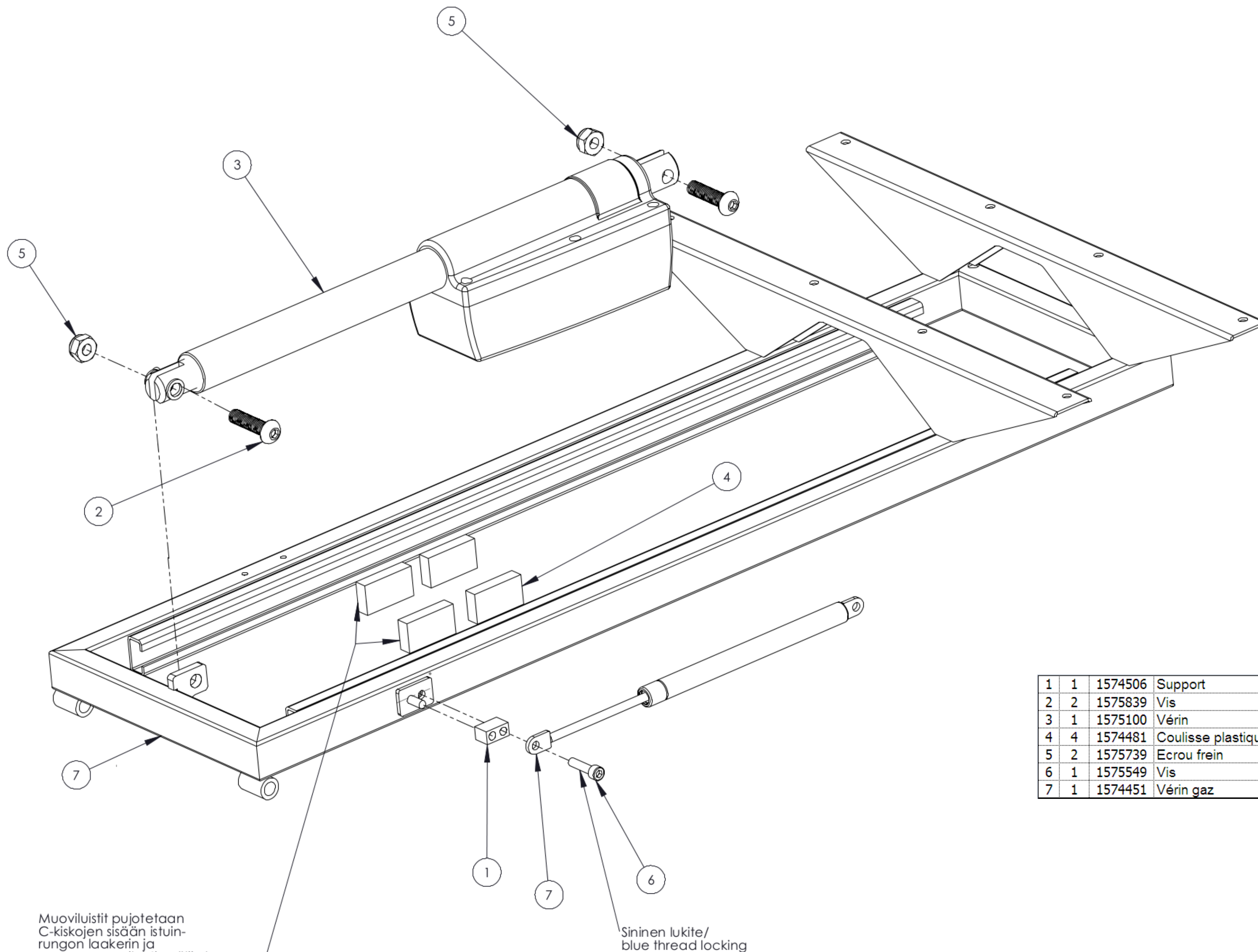


1	1	1574506	Support
2	2	1575839	Vis
3	1	1575100	Vérin
4	4	1574481	Coulisse plastique
5	2	1575739	Ecrou frein
6	1	1575549	Vis
7	1	1574451	Vérin gaz

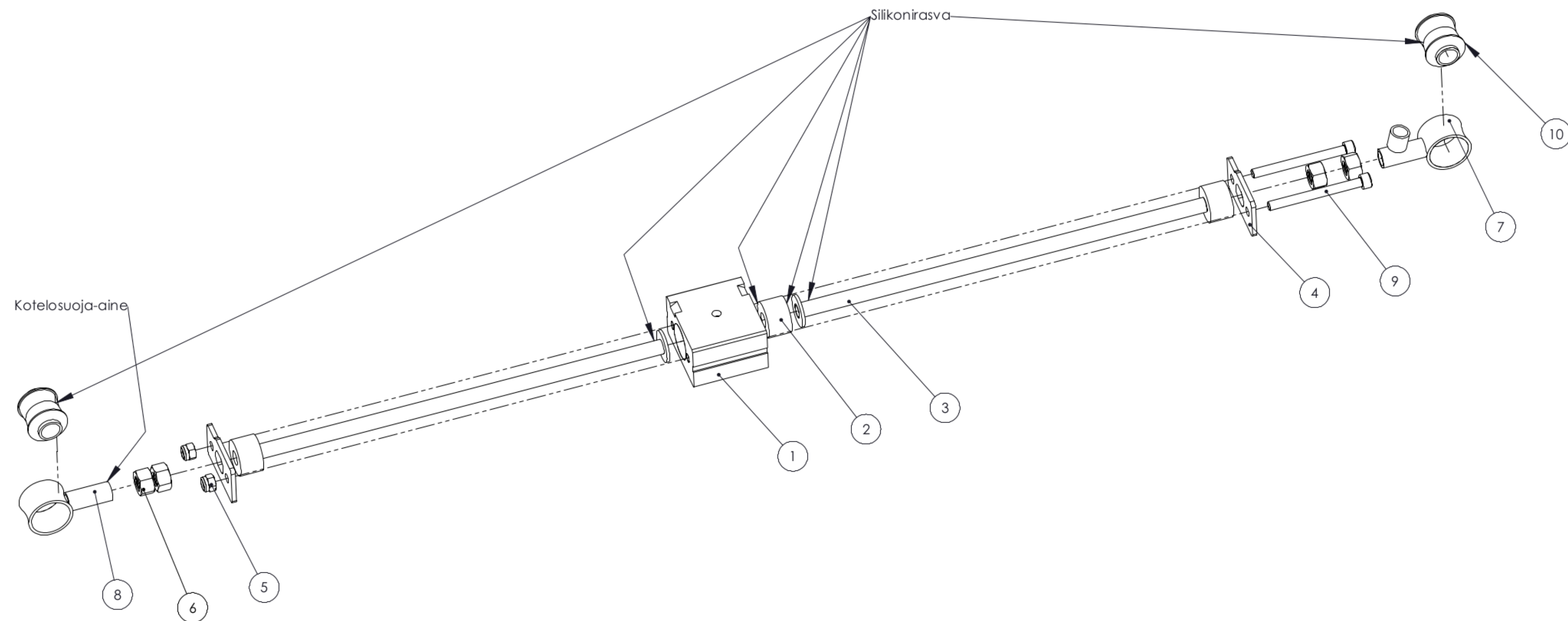

1	1	1574498	Boite de direction
2	3	1574499	Rotule caoutchouc
3	2	1574501	Tige de direction
4	2	1574497	Plaque d'arrêt
5	2	1575751	Ecrou frein
7	1	1574504	Support de rotule arrière
8	1	1574503	Support de rotule avant
9	2	1575600	Vis
10	2	1575995	Bague caoutchouc

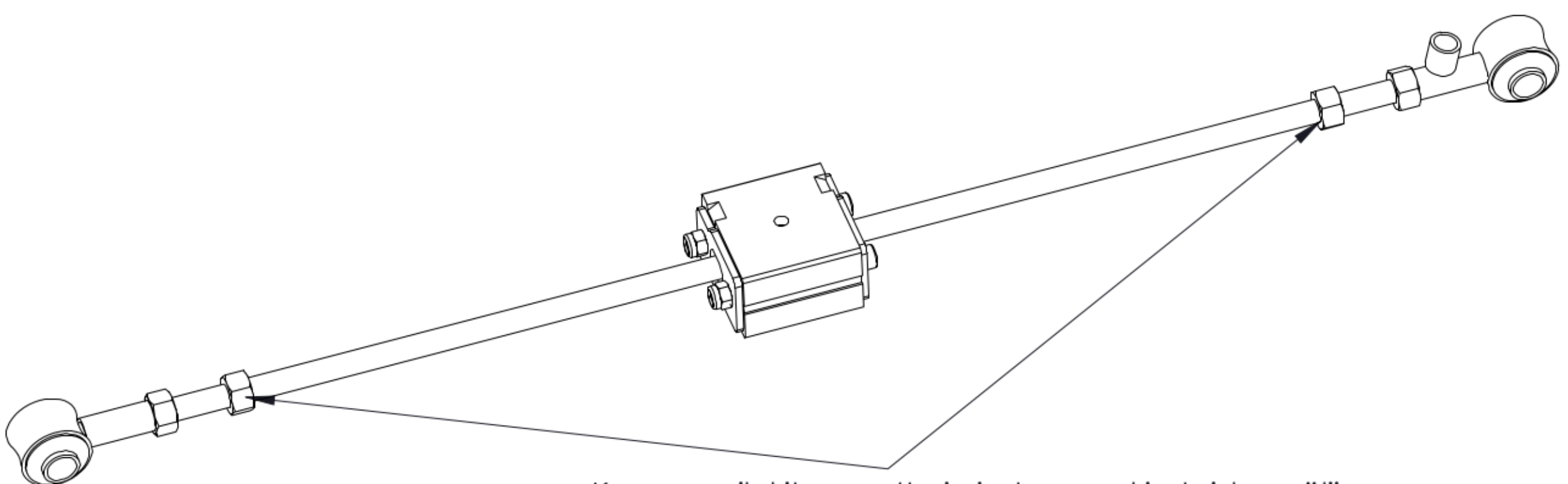


Kova ruuvilukite muutterin ja tangon kierteiden väliin.
Mutteri kierteiden pohjaan saakka /
Hard thread locking. These two nuts should be installed in the
end of thread

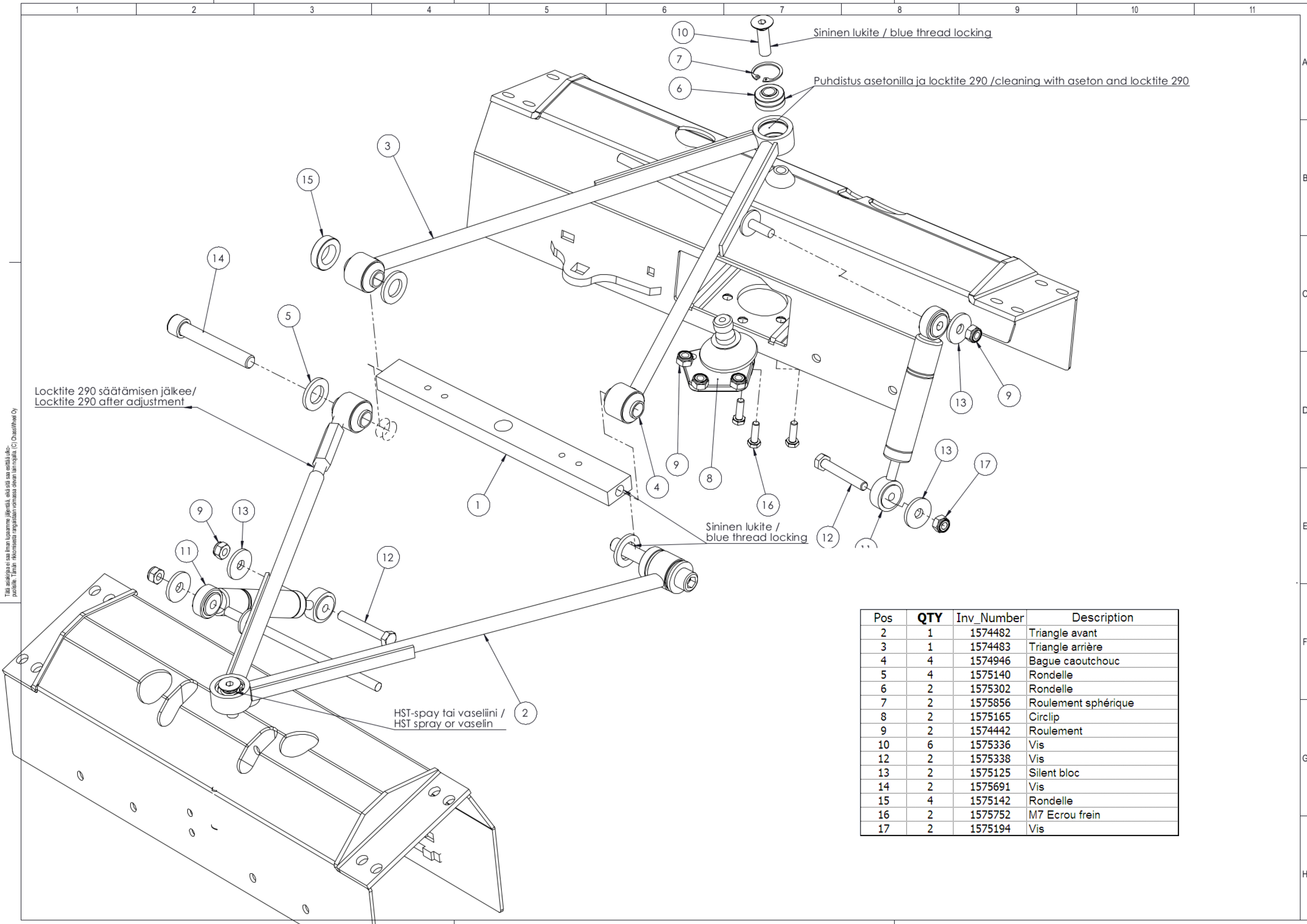


Tätä asiakirjaa ei saa ilman lupaa kopioida, eikä sitä saa esittää ulkopuolelle. Tämän rikkomisesta rangaistusta voidaan määrätä. (C) ChassisWheel Oy

Pos	QTY	Inv_Number	Description
2	1	1574482	Triangle avant
3	1	1574483	Triangle arrière
4	4	1574946	Bague caoutchouc
5	4	1575140	Rondelle
6	2	1575302	Rondelle
7	2	1575856	Roulement sphérique
8	2	1575165	Circlip
9	2	1574442	Roulement
10	6	1575336	Vis
12	2	1575338	Vis
13	2	1575125	Silent bloc
14	2	1575691	Vis
15	4	1575142	Rondelle
16	2	1575752	M7 Ecrou frein
17	2	1575194	Vis

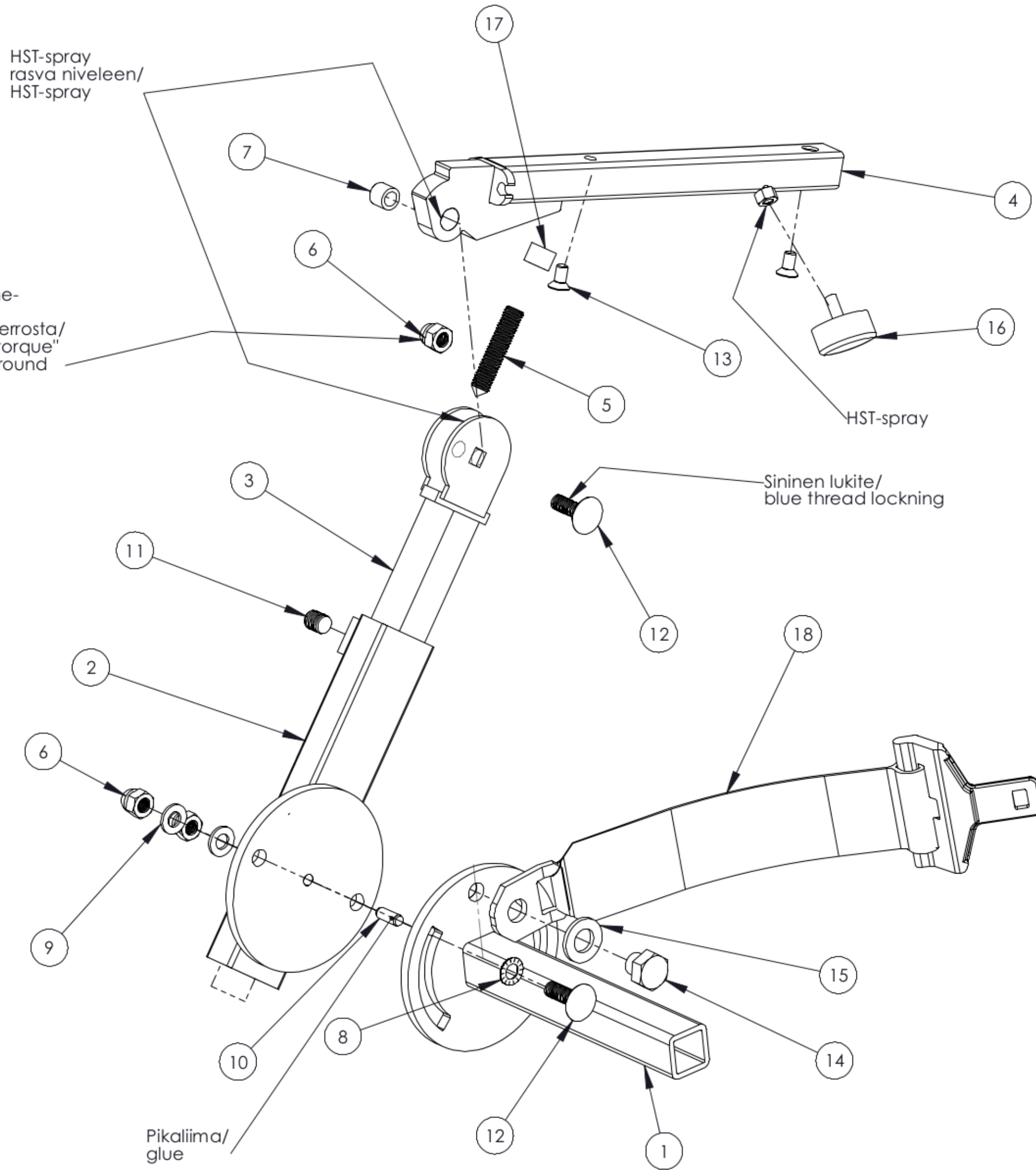



1	1	1574719	Assise
2	1	1574963	Dossier
3	1	1574951	Fixation de dossier, gauche
4	1	1574962	Fixation de dossier, droite
5	1	1574693	Fixation de dossier 3 assise CW
6	1	1574694	Fixation de dossier 2 assise CW
7	1	1574953	Contreplaque de dossier 1
8	3	1574961	Contre plaque
9	2	1574689	Vis MSG M6x15
10	6	1574705	Rondelle 9x17x1,5
13	6	1575508	Vis
14	1	1575535	Vis
16	1	1575664	Vis
17	1	1575648	Vis
18	2	1575559	Vis
19	2	1576035	Plaque d'assise
20	1	1574687	Entretoise
21	1	1574685	Entretoise
25	2	1576039	Bouchon
26	2	1575113	Bande

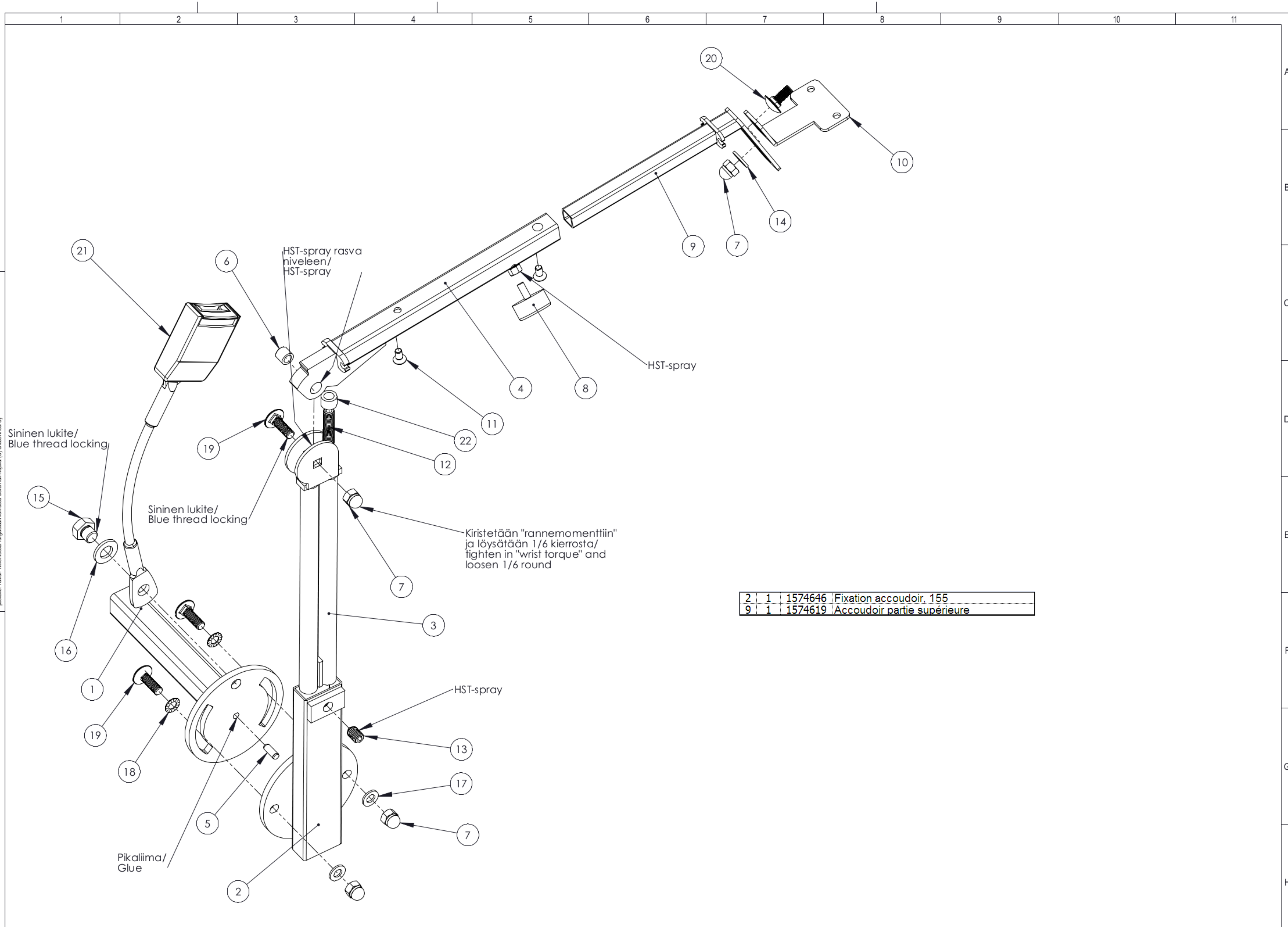


2	1	1574646	Fixation accoudoir, 155
9	1	1574619	Accoudoir partie supérieure

1574401	Repose-jambe électrique FOUR X DL
---------	-----------------------------------

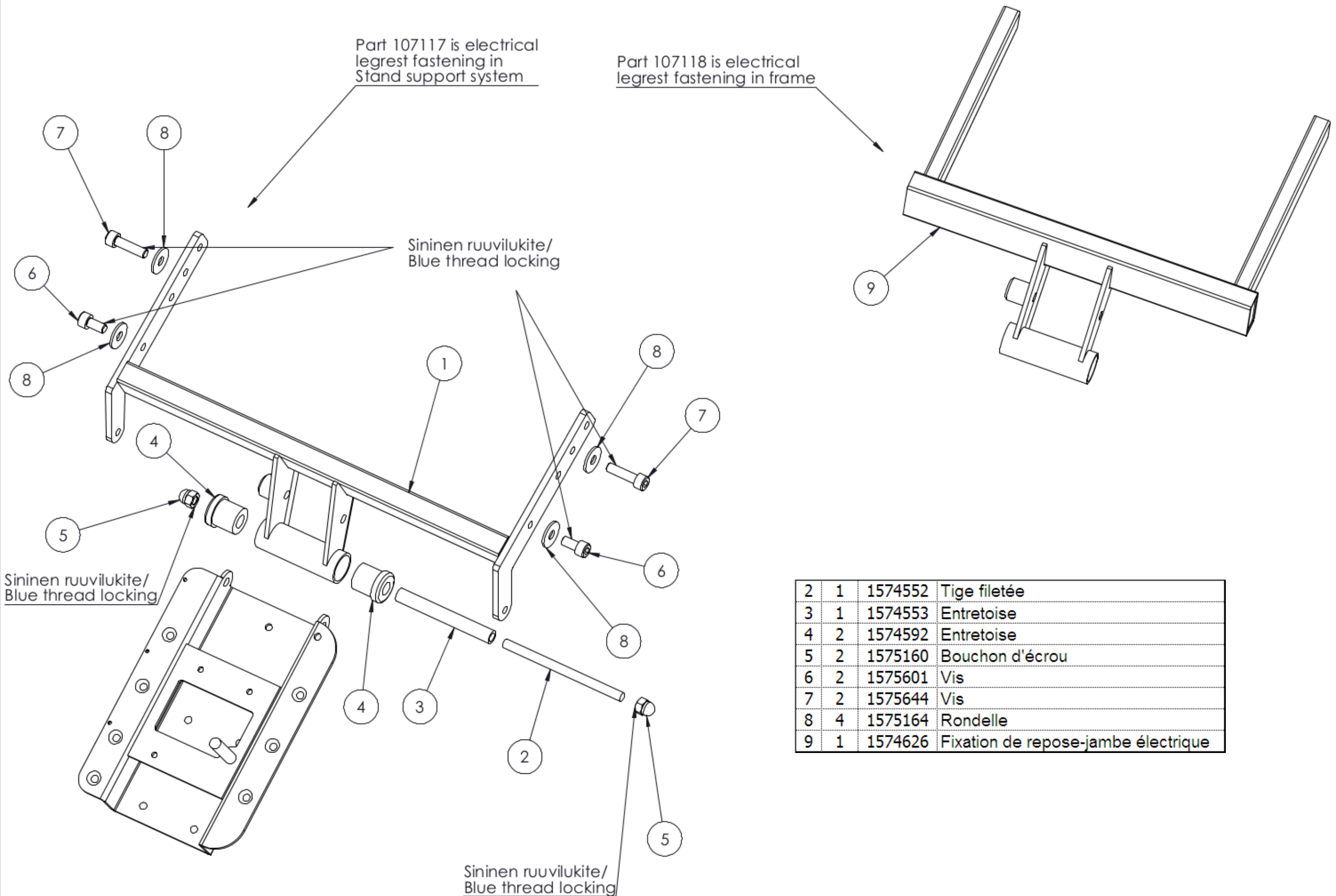


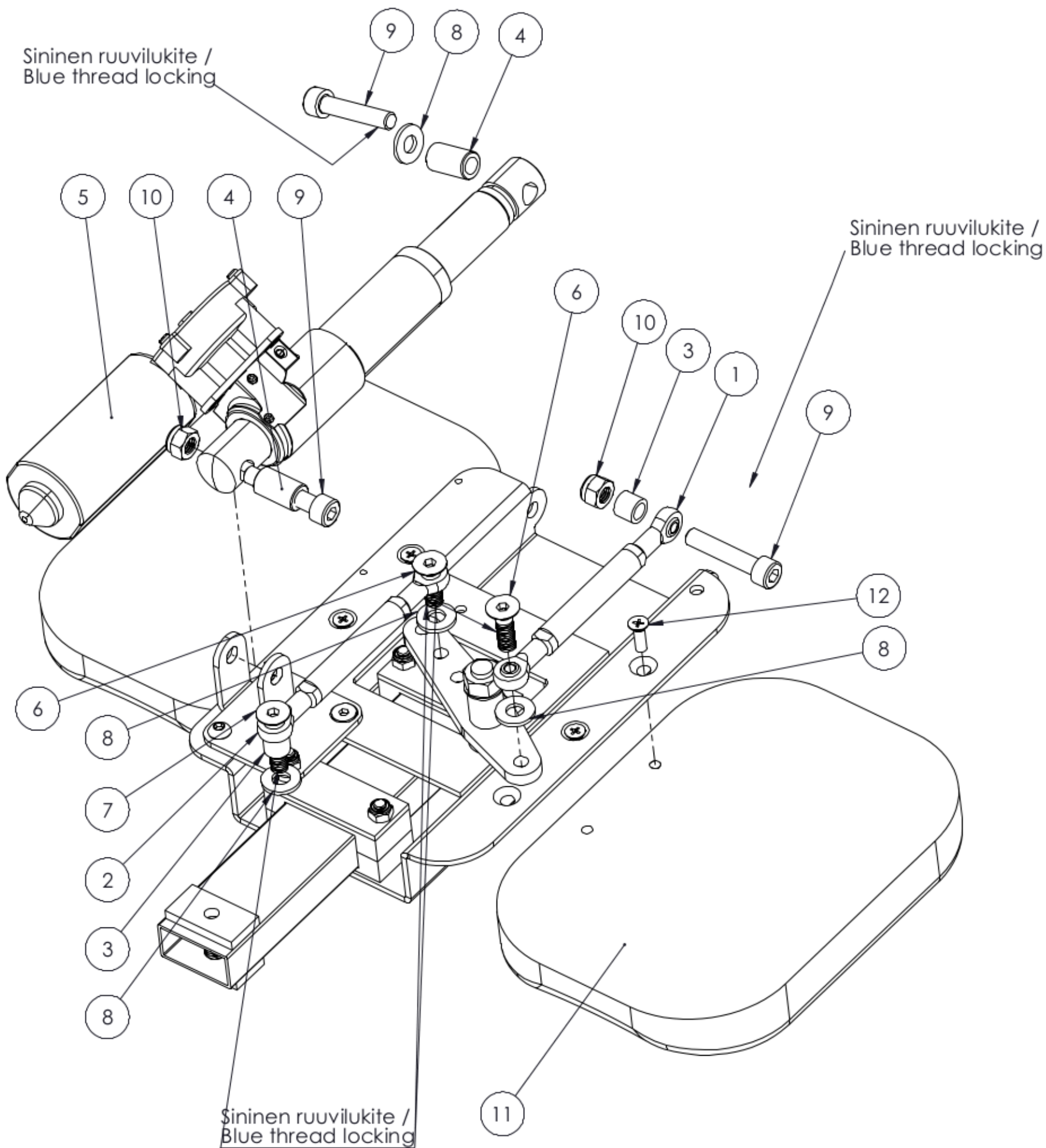

1	1	1574628	Bielette de compensation
2	1	1574629	Bielette de compensation
3	2	1574948	Entretoise
4	2	1574554	Entretoise
6	2	1575533	Vis
7	1	1575534	Vis
9	3	1575663	Vis
11	2	1575975	Coussin
12	4	1575737	Vis

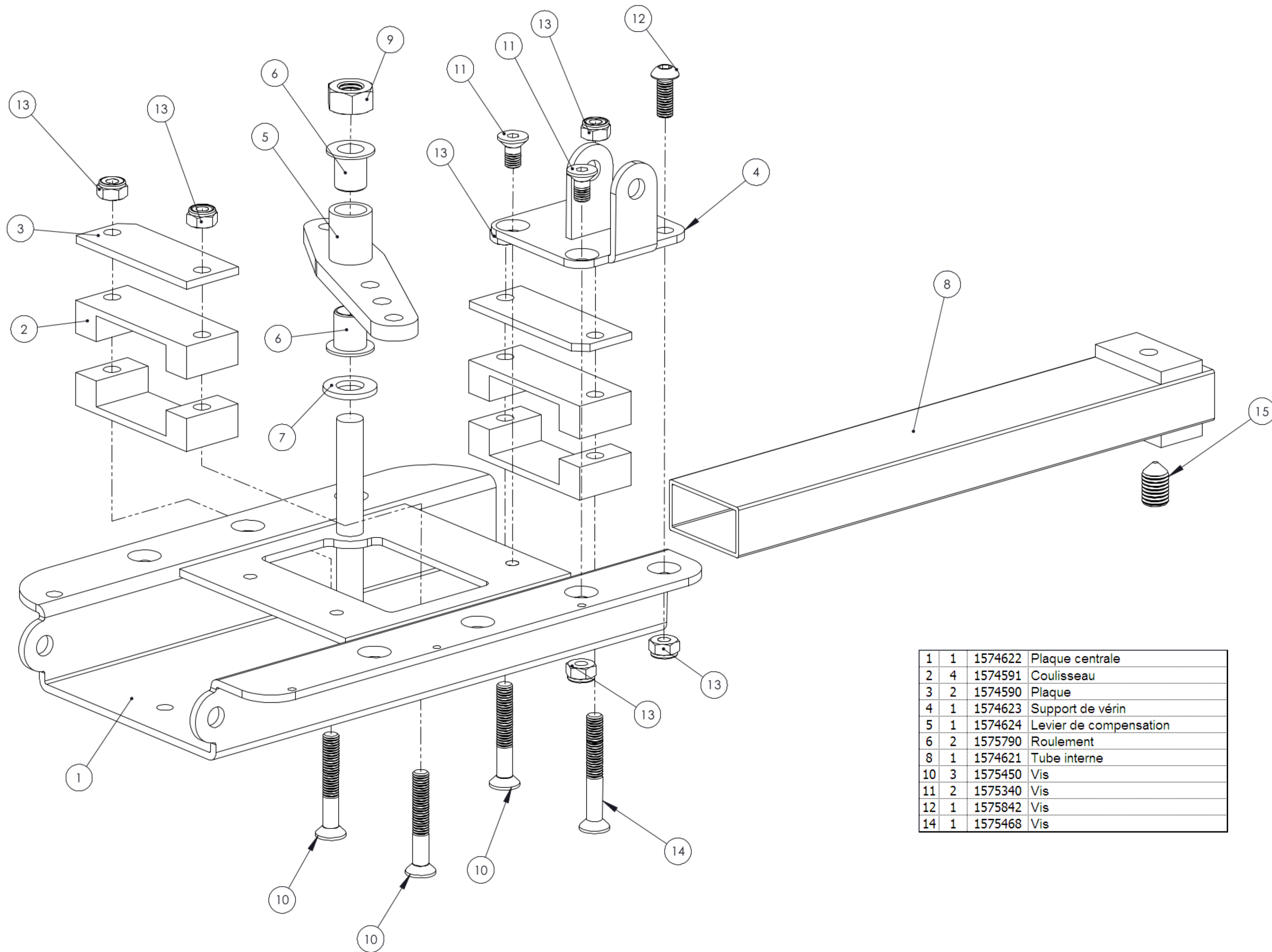


1	1	1574622	Plaque centrale
2	4	1574591	Coulisseau
3	2	1574590	Plaque
4	1	1574623	Support de vérin
5	1	1574624	Levier de compensation
6	2	1575790	Roulement
8	1	1574621	Tube interne
10	3	1575450	Vis
11	2	1575340	Vis
12	1	1575842	Vis
14	1	1575468	Vis

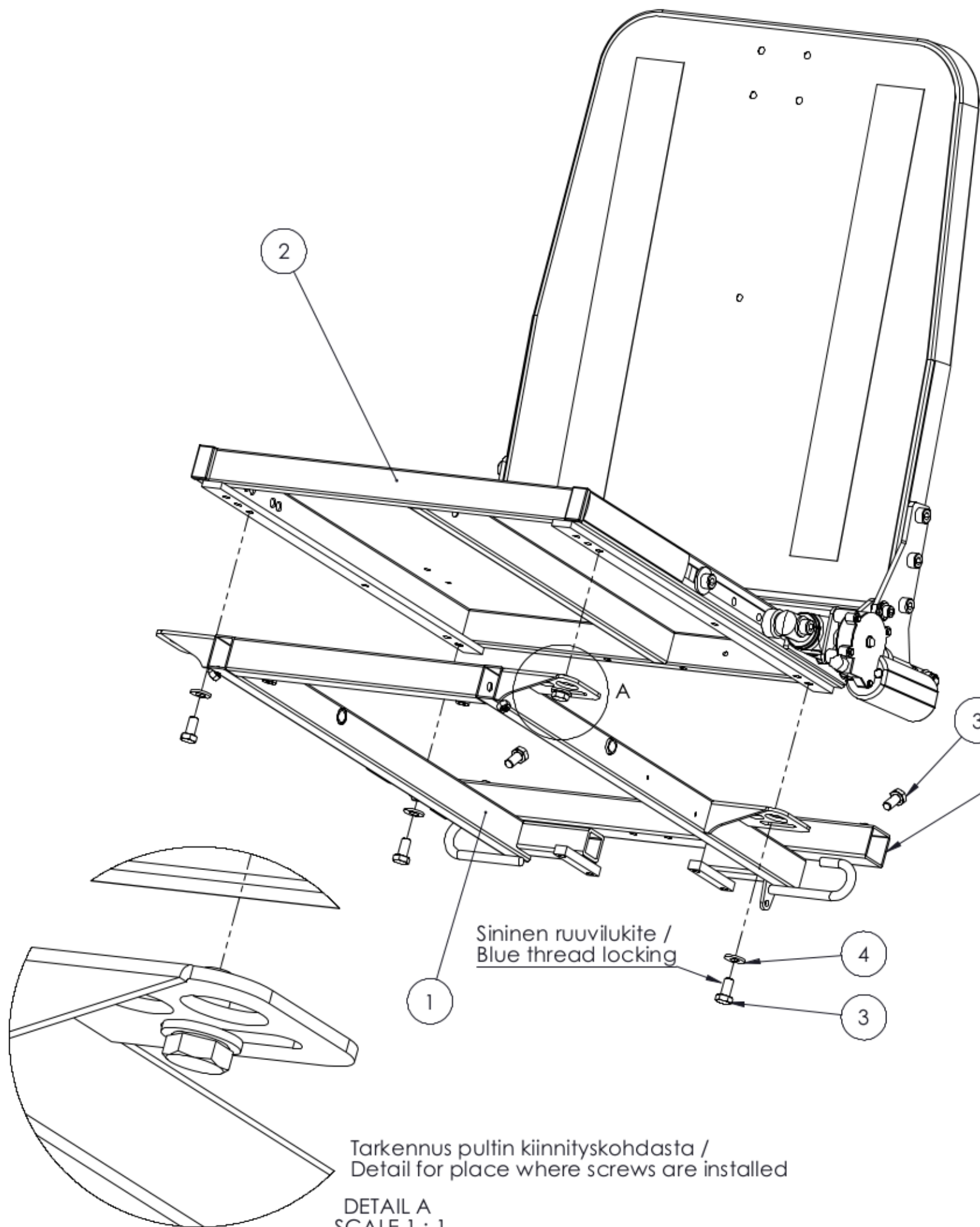


Käsituet tulevat kiinni istuinrungon putkeen /
Armrests are installed in seatframes pipe


1	1	1574529	Cadre d'assise
2	1	1574427	Assise CW
3	6	1575677	Vis

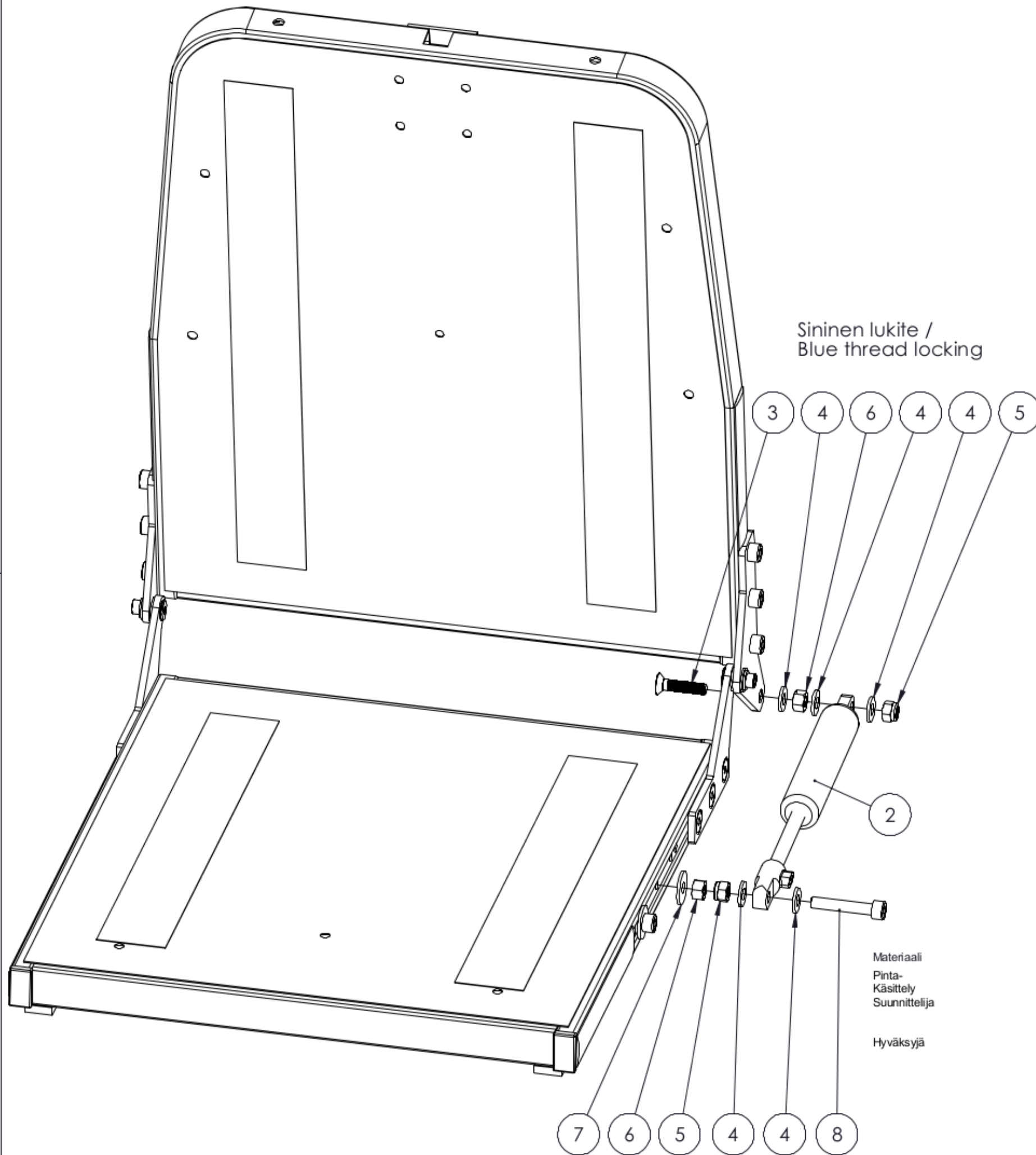


1	1	1574426	Assise CW
2	1	1574907	Vérin gaz
3	1	1575478	Vis
8	1	1575647	Vis

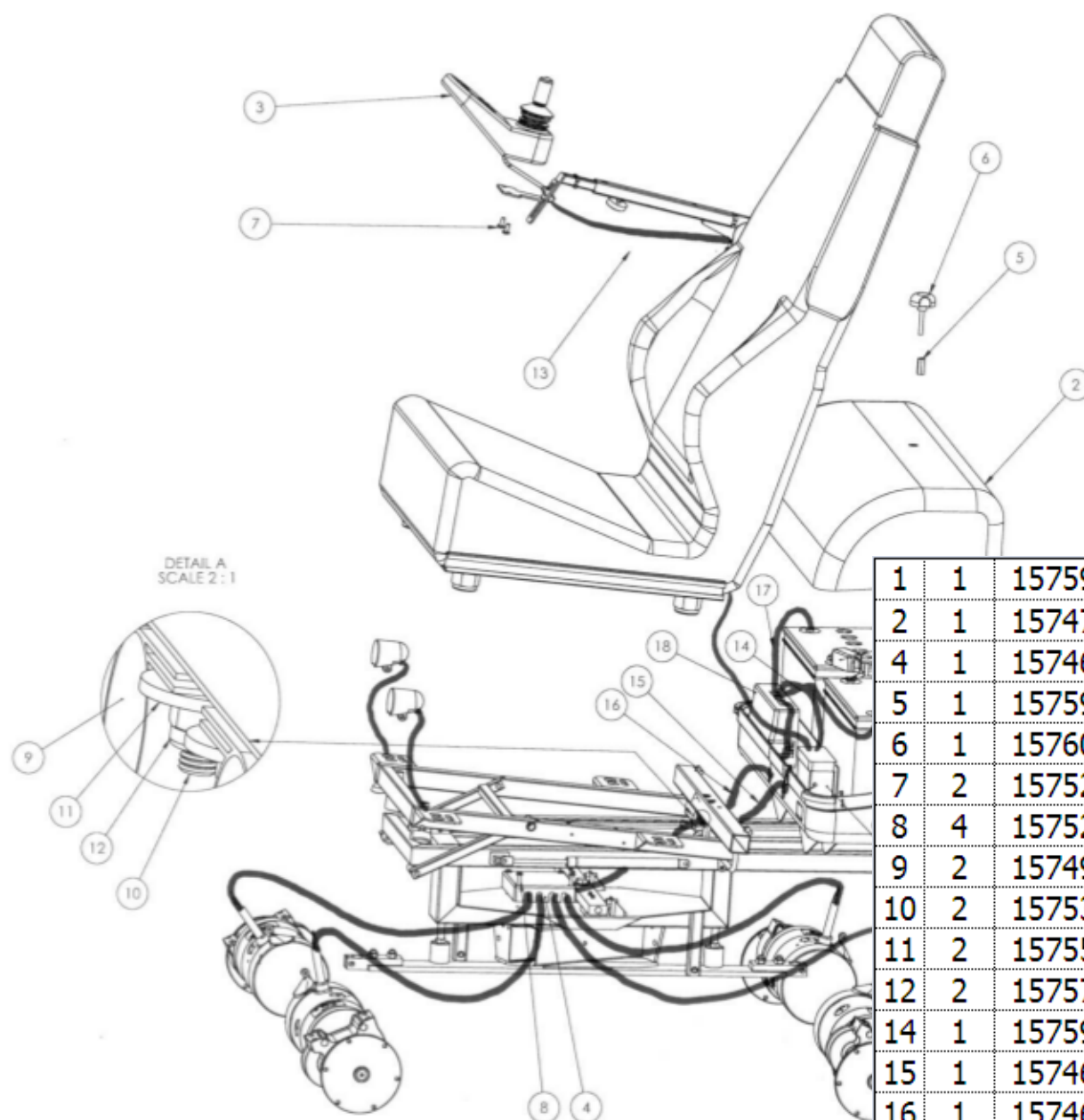


1	1	1575951	Boite fusible
2	1	1574723	Bac batterie supérieur
4	1	1574659	Boitier de protection connexion moteurs
5	1	1575934	Ecrou
6	1	1576038	Vis
7	2	1575201	Vis
8	4	1575203	Vis
9	2	1574950	Tube
10	2	1575337	Vis
11	2	1575536	Rondelle
12	2	1575738	Ecrou frein
14	1	1575996	ISM-PM cable
15	1	1574660	Cable moteur sortie module de puissance
16	1	1574661	Câble vérin
17	1	1574662	Cable batterie

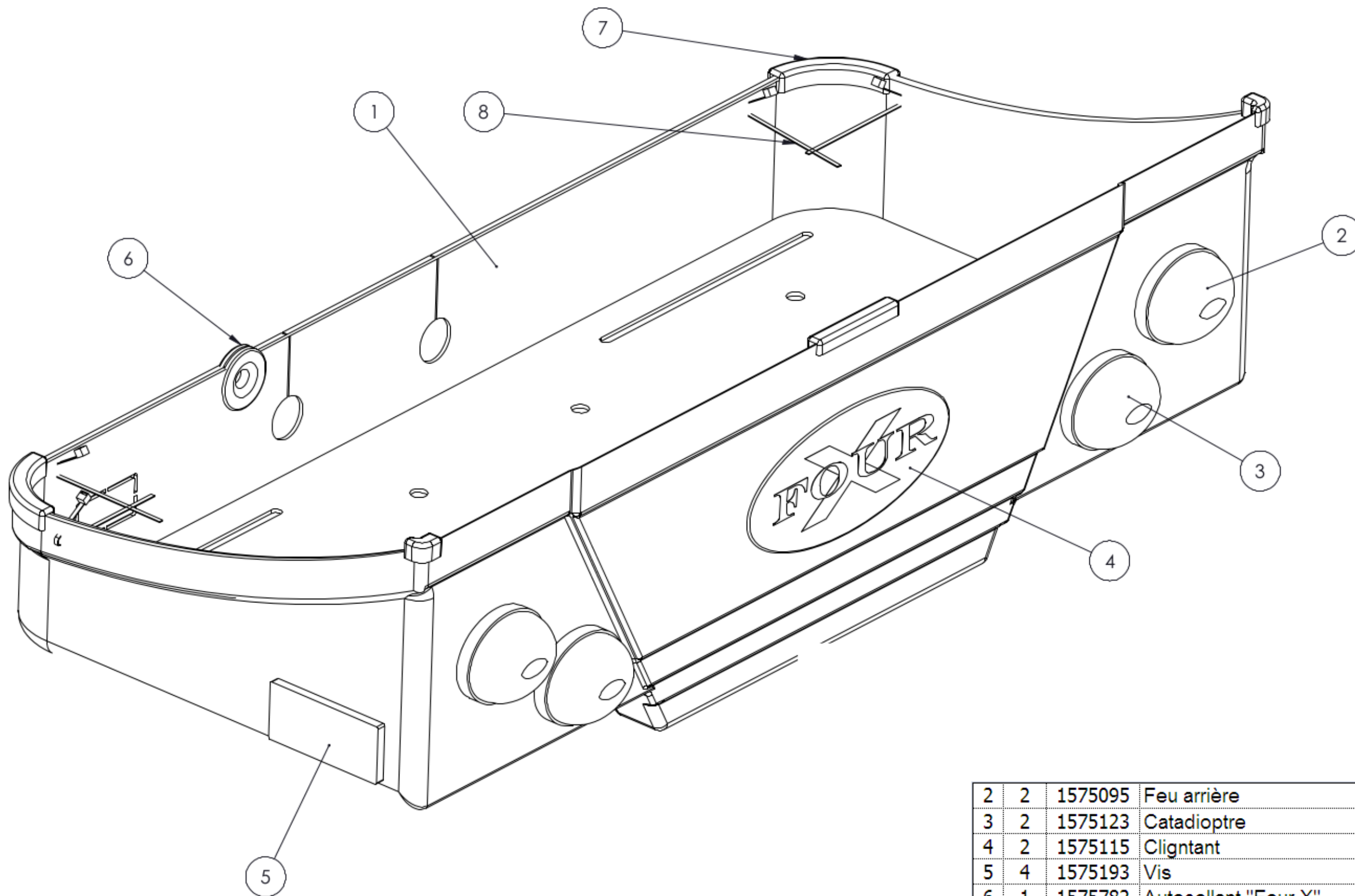


2	2	1575095	Feu arrière
3	2	1575123	Catadioptr
4	2	1575115	Clignant
5	4	1575193	Vis
6	1	1575782	Autocollant "Four X"
7	2	1574509	Caoutchouc
8	4	1576042	Collier de câble

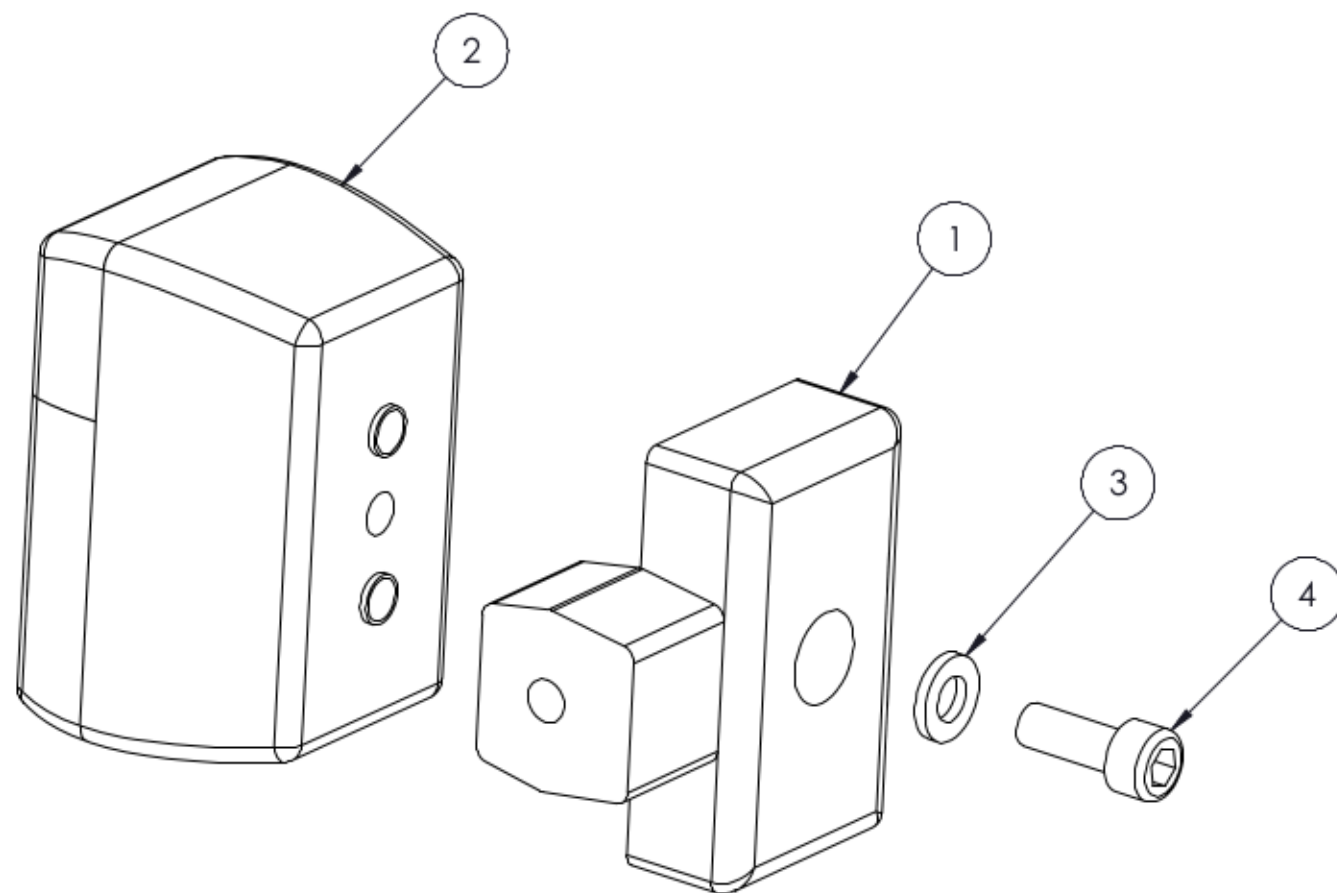


4	1	1574651	Entretoise
6	1	1575866	Led feu avant

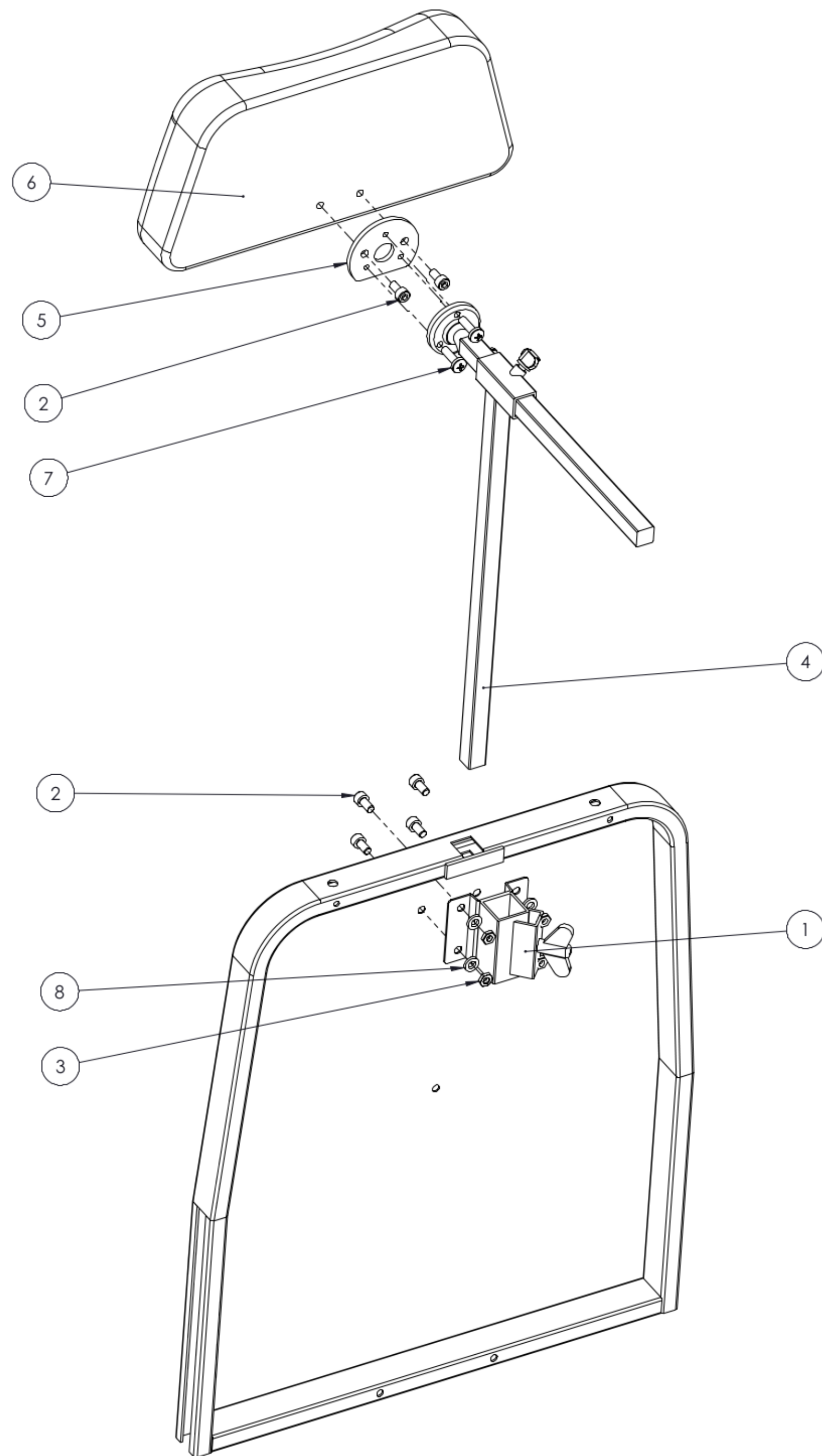


1	1	1574982	Support réglable en hauteur
2	6	1575539	Vis
3	4	1575162	Vis
4	1	1574449	Tige support appui-tête
5	1	1574702	Support appui tête
7	3	1575199	Vis

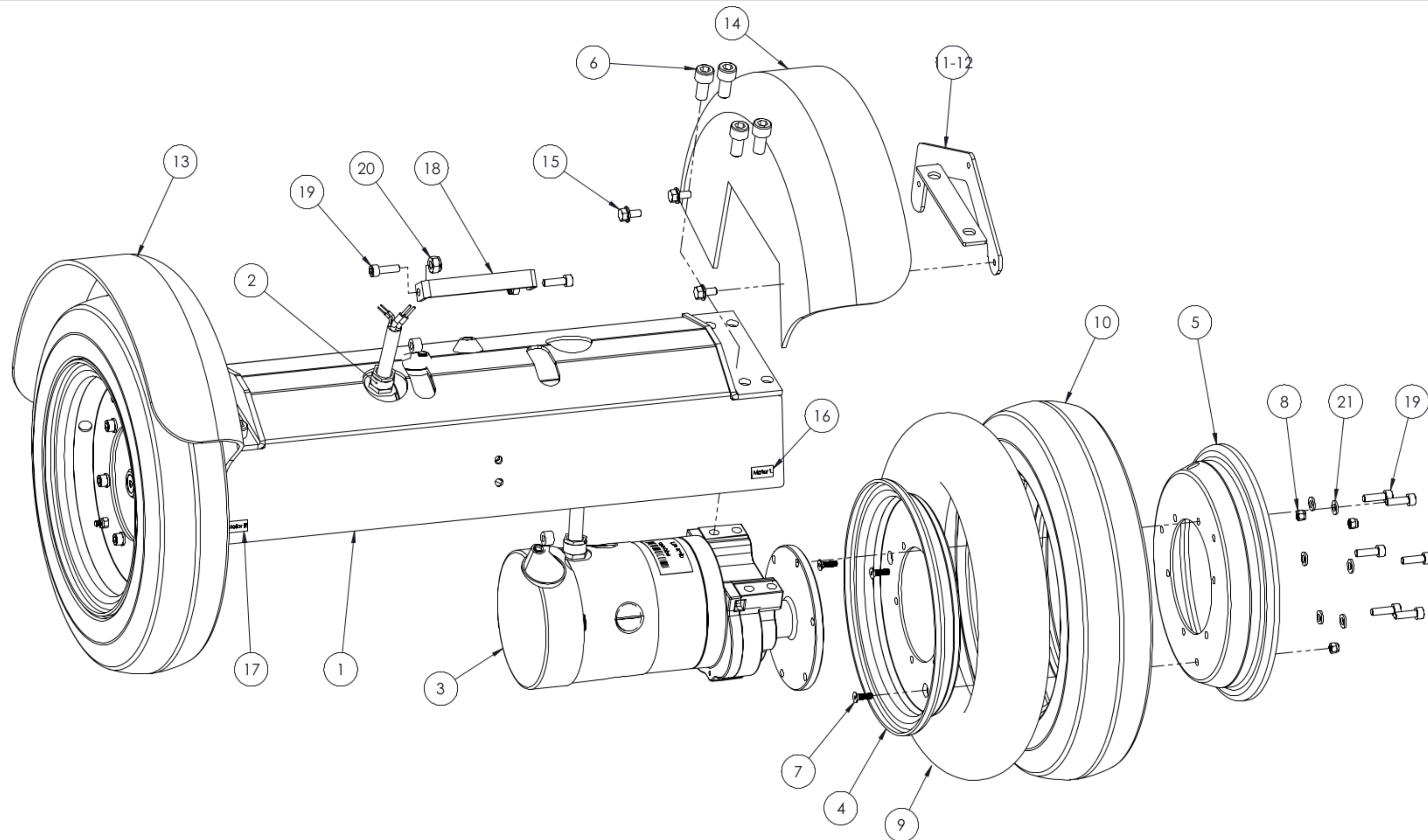


3	16	1575191	Vis
7	4	1574682	Jante MM 8 , intérieure
8	4	1574683	Jante MM 8 rim, extérieure
9	4	1575131	Chambre à air 8"
10	4	1575112	Pneumatique 8"
12	6	1575750	Ecrou frein
13	2	1574447	Support garde-boue 3 (8" rim)
14	2	1574448	Support garde-boue 4 (8" rim)
15	2	1574663	Garde boue 8", droit
16	2	1574664	Garde boue 8", gauche

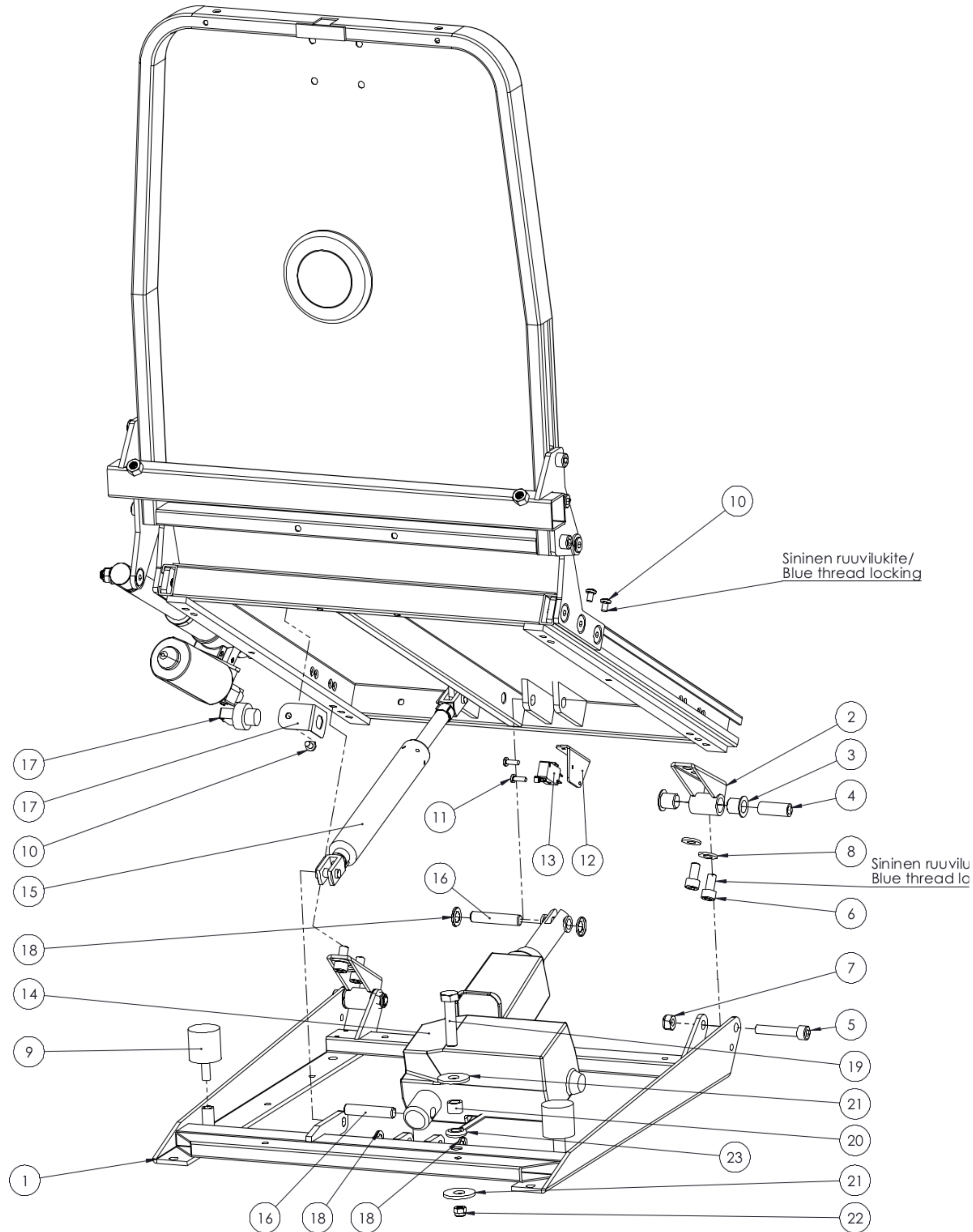

1	1	1574707	Fixation de chassis
2	2	1574708	Support
3	4	1575807	Roulement
4	2	1574684	Entretoise
5	3	1575671	Vis
8	4	1575678	Rondelle
9	2	1574908	Bague caoutchouc
10	3	1575300	Vis
11	2	1575202	Vis
12	1	1574686	Fixation microswitch
13	1	1575953	Microswitch
14	1	1575863	Vérin
16	2	1574691	Goupille de fixation vérin
18	4	1574703	Bague de verouillage
19	1	1575705	Vis
20	1	1574704	Entretoise
21	2	1575537	Rondelle
23	1	1575134	Câble

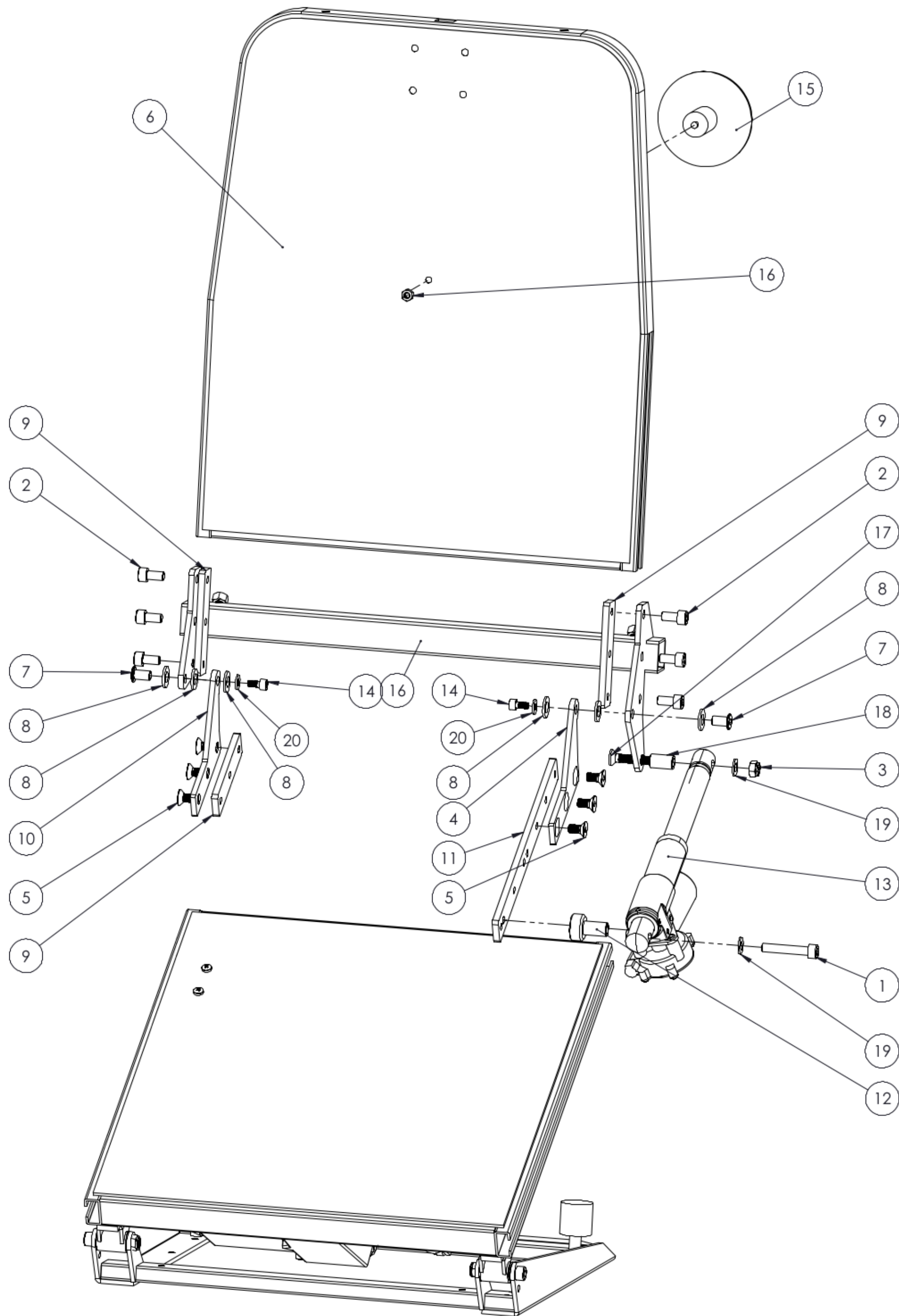


1	3	1575645	Vis
4	1	1574952	Fixation de dossier, droite
5	6	1575532	Vis
6	1	1574964	Dossier
7	2	1574690	Vis MSG M6x15
8	6	1574706	Rondelle 9x17x1,5
13	1	1575977	Vérin
14	2	1575543	Vis
15	1	1574692	Switch fin de course
17	1	1575469	Vis
18	1	1574688	Entretoise

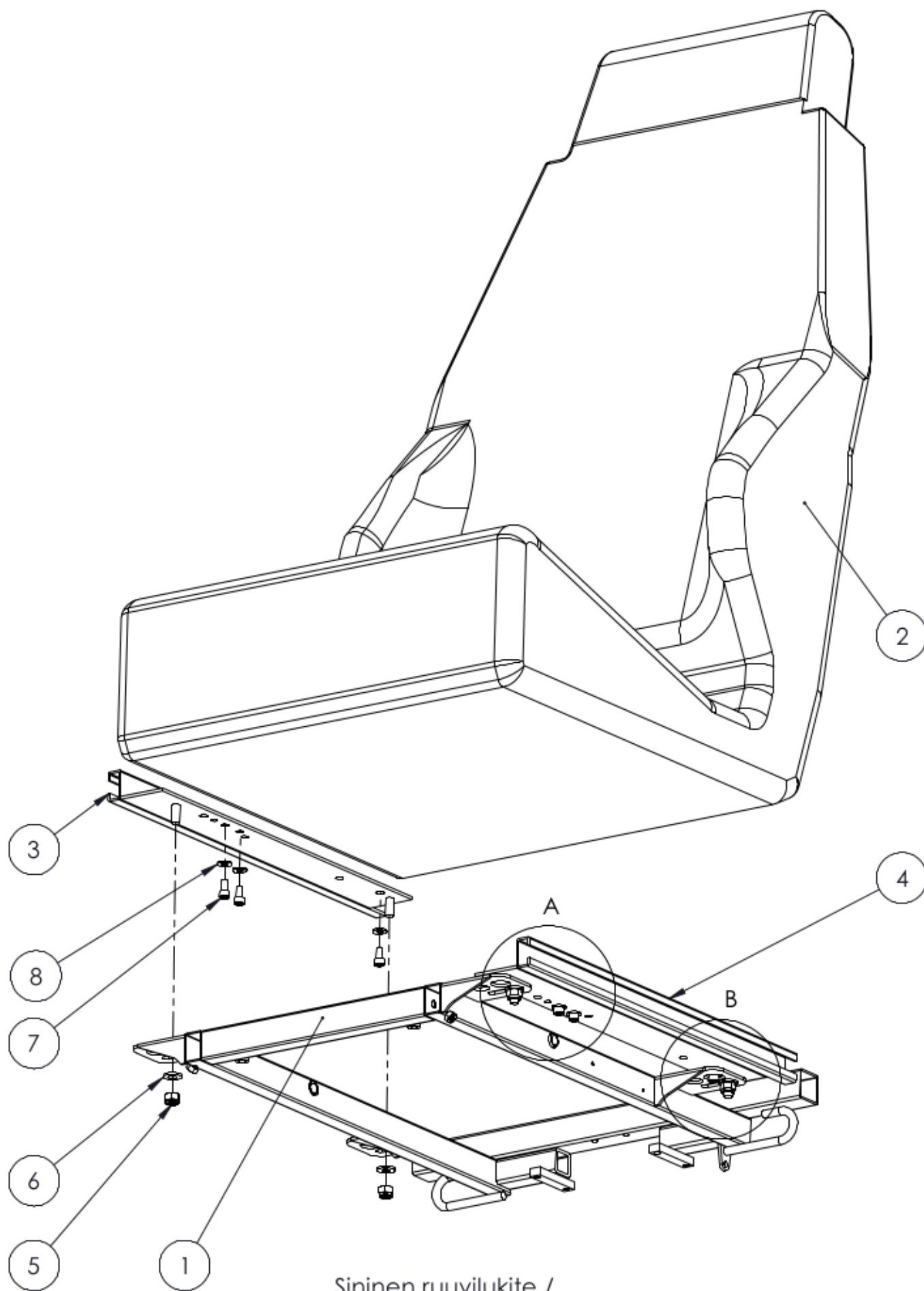


Sininen ruuvilukite /
Blue thread locking

DETAIL A
SCALE 2 : 5

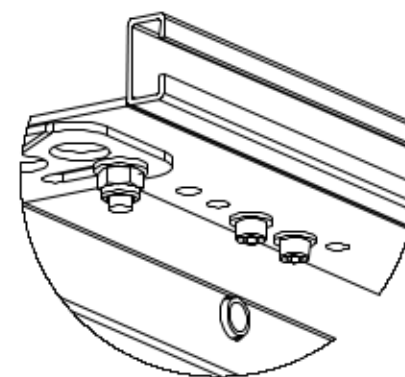

Istuimen kiinnitys etuosasta/
Seat installation from front

DETAIL B
SCALE 2 : 5

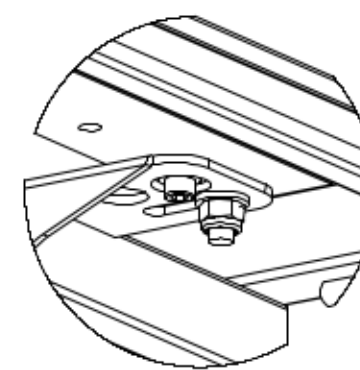

Istuimen kiinnitys takaosasta/
Seat installation from rear

2	1	1575978	Assise
3	1	1574531	Support droit
4	1	1574533	Support gauche
7	6	1575546	Vis