

Instructions de montage des dispositifs de maintien postural Dynaform®



Les dispositifs de maintien postural sont conçus pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier des atouts d'un bon positionnement. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible et si vous le jugez nécessaire à vous fournir une formation supplémentaire pour le montage de ces dispositifs. Ces appareils doivent être mis en place par des personnes qualifiées.

Outils nécessaires: clés Allen de 1/8" (3 mm) et 5/32" (4 mm).

Toutes les vis doivent être serrées à 20 in-lb (2,3 N). Lisez attentivement les instructions suivantes avant le montage.

Etape 1:

Déterminez l'endroit où vous souhaitez positionner la ceinture et repérez les meilleurs points d'ancrage des sangles. Les sangles peuvent être fixées sur le dossier ou sur l'assise du siège, et être ancrées sur les trous existants ou sur des trous percés spécifiquement pour les ancrages.

Etape 2: Pour la ceinture de maintien en Y

Identifiez les trois points d'ancrage. Notez que le dispositif en Y peut être positionné avec la sangle supérieure (F) par-dessus l'épaule gauche (comme sur le schéma) ou avec la sangle (B) par-dessus l'épaule droite (en retournant l'ensemble). Fixez tous les ancrages (D) au point de fixation en utilisant les vis et les écrous fournis. Veillez à ce que la ceinture soit bien fixée dans le système d'ancrage (Figure 2).

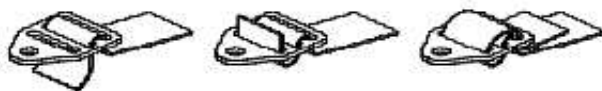


Figure 2

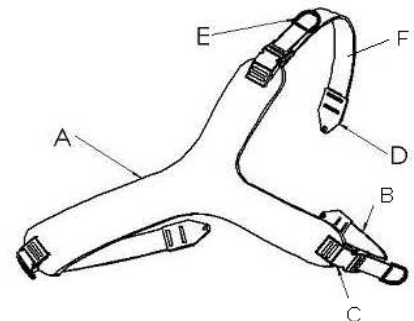


Figure 1

Etape 3: Pour la ceinture de maintien 2 points

Identifiez les deux points d'ancrage (Figure 3 et 4). Fixez tous les ancrages (D) au point de fixation en utilisant les vis et les écrous fournis. Veillez à ce que la ceinture soit bien fixée dans le système d'ancrage (Figure 2).

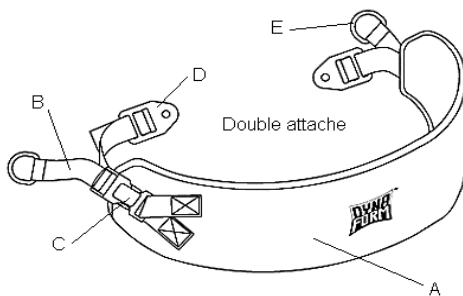


Figure 3

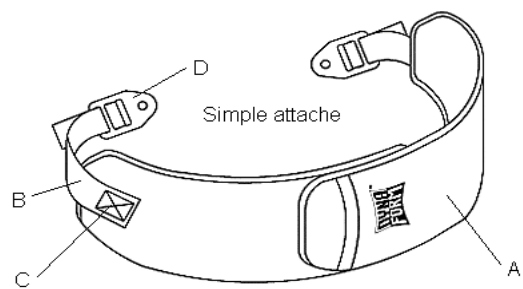


Figure 4

Etape 4: Pour la ceinture de maintien en X

Identifiez les quatre points d'ancrage (Figure 5). Fixez tous les ancrages (D) au point de fixation en utilisant les vis et les écrous fournis. Veillez à ce que la ceinture soit bien fixée dans le système d'ancrage (Figure 2).

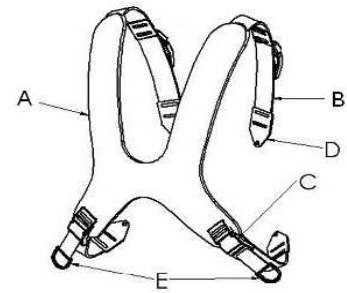


Figure 5

Etape 5: Réglage et utilisation

Les anneaux (E) sont prévus pour un réglage rapide et facile de la longueur de la sangle. Des boucles à déclenchement rapide (C) sont prévues sur toutes les sangles pour entrer et sortir facilement du dispositif.

Limites d'utilisation	Maintenance	Formation	Entretien
Ces produits sont compatibles avec un grand nombre de fauteuils roulants. Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur leur utilisation appropriée. Invacare n'est pas responsable d'une quelconque mauvaise utilisation du dispositif. Nous vous recommandons de consulter des professionnels avant de choisir et d'utiliser nos produits. Ces dispositifs ne doivent pas remplacer d'autres systèmes de retenue nécessaires au transport.	Toutes les fixations doivent être contrôlées régulièrement au niveau de la tension.	Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire pour le montage du dossier Pro-tech ou de plus ample renseignements sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec Invacare.	Un nettoyage régulier permet de maintenir une bonne hygiène.