

Instructions de montage de l'adducteur du genou POSAlinc®



L'adducteur de genou standard et le POSAlinc® sont conçus pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier des atouts d'un bon positionnement. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible et si vous le jugez nécessaire à vous fournir une formation supplémentaire pour le montage de ces adducteurs. Ces appareils doivent être mis en place par des personnes qualifiées.

Outils nécessaires : clés Allen de 1/8" (3 mm) et 5/32" (4 mm).

Toutes les vis doivent être serrées à 20 in-lb (2,3 N). Lisez attentivement les instructions suivantes avant

Etape 1:

Déterminez l'endroit où vous souhaitez positionner l'adducteur sur le cadre du fauteuil roulant.

Etape 2:

Desserrez la vis (C) jusqu'à ce que la bride (B) s'adapte sur le tube de la potence (A). Serrez les vis (C). Fixez ensuite l'adducteur (I + D) sur le système de fixation (C + B)

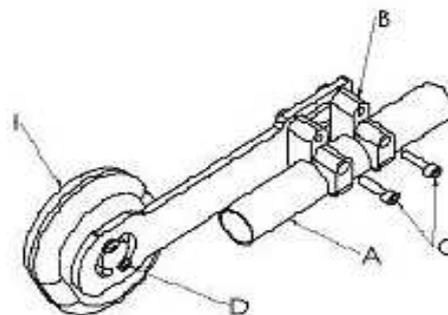


Figure 1

| Limites d'utilisation | Maintenance | Formation | Entretien |
|--|--|--|---|
| <p>Le produit est compatible avec un grand nombre de fauteuils roulants. Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur l'utilisation appropriée. Invacare n'est pas responsable d'une quelconque mauvaise utilisation du dispositif. Nous vous recommandons de consulter des professionnels avant de choisir et d'utiliser nos produits. Ce dispositif ne doit pas remplacer d'autres systèmes de retenue nécessaires au transport.</p> | <p>Toutes les fixations doivent être contrôlées régulièrement au niveau de la tension.</p> | <p>Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire pour le montage des produits Pro-tech ou de plus ample renseignements sur l'utilisation de ceux-ci, n'hésitez pas à prendre contact avec Invacare.</p> | <p>Un nettoyage régulier permet de maintenir une bonne hygiène.</p> |