

Instructions de montage du plot d'abduction



Les abducteurs de cuisse à bouton poussoir et à déclenchement par levier sont conçus pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier d'un bon positionnement. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible et si vous le jugez nécessaire à vous fournir une formation supplémentaire pour le montage des abducteurs. Ces appareils doivent être mis en place par des personnes qualifiées.

Outils nécessaires : clés Allen de 1/8" (3 mm) et 5/32" (4 mm).

Toutes les vis doivent être serrées à 20 in-lb (2,3 N). Lisez attentivement les instructions suivantes avant le montage.

Ce dispositif nécessite une assise rigide.

Etape 1:

Déterminez l'endroit où vous souhaitez positionner le plot d'abduction sur l'assise (généralement à l'avant et au centre).

Etape 2:

Débloquez l'appui-abducteur et basculez-le vers le bas comme indiqué avec l'appui (E). Montez la plaque (B) sous le siège à l'aide des vis d'assemblage (D), des écrous à souder (C) et des rondelles (A). Rebasculez l'appui vers le haut. (Figure 1)

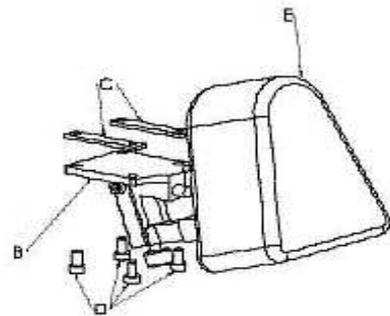


Figure 1

Etape 3: Montage du plot d'abduction

Fixez le plot sur la plaque supérieure à l'aide des vis fournies et serrez selon les indications.

Etape 4: Utilisation

Basculer l'appui vers l'extérieur autant que nécessaire en appuyant simplement sur le bouton poussoir. Remettez l'appui en place dès que la personne est installée.

Limites d'utilisation	Maintenance	Formation	Entretien
Ce dispositif ne doit pas remplacer d'autres supports nécessaires au transport. Le produit est compatible avec un grand nombre de fauteuils roulants. Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur l'utilisation appropriée. Nous ne sommes pas responsable d'une quelconque mauvaise utilisation du dispositif. Nous vous recommandons de consulter des professionnels avant de choisir et d'utiliser nos produits.	Toutes les fixations doivent être contrôlées régulièrement au niveau de la tension.	Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire pour le montage du matériel Pro-tech ou de plus ample renseignements sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec Invacare.	Un nettoyage régulier permet de maintenir une bonne hygiène.