

Instructions de montage de l'appui-tête MSS Pro-tech



L'appui-tête MSS Pro-tech est conçu pour que la plus grande variété d'utilisateurs puisse bénéficier des atouts d'un bon positionnement. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible et si vous le jugez nécessaire à vous fournir une formation supplémentaire pour le montage de cet appui-tête. Ce dispositif doit être mis en place par des personnes qualifiées.

Outils nécessaires : clés Allen de 1/8" (3 mm) et 5/32" (4 mm).

Toutes les vis doivent être serrées à 20 in-lb (2,3 N). Lisez attentivement les instructions.

Etape 1: Fixation du support au dossier Pro-tech

Retirez la sangle de transport à l'aide d'une clé Allen de 5/16" (4 mm). Avec un tournevis et un marteau, percez les trous correspondant à ceux de la plaque de montage (B) de l'appui-tête (Figure 1). Fixez le tout avec les vis (C), les rondelles (D) et les écrous à souder (E) fournis de telle sorte que la plaque se trouve à l'intérieur du dossier (A).

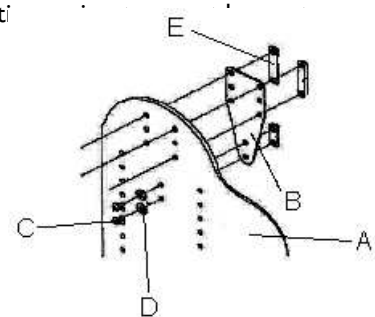


Figure 1

Etape 2:

Fixez le dispositif de fixation de l'appui tête (F) au dossier (A) à l'aide des vis, rondelles et écrous fournis. Fixez ensuite le dispositif de fixation de l'appui-tête (F) à l'appui tête (G). (Figure 2)

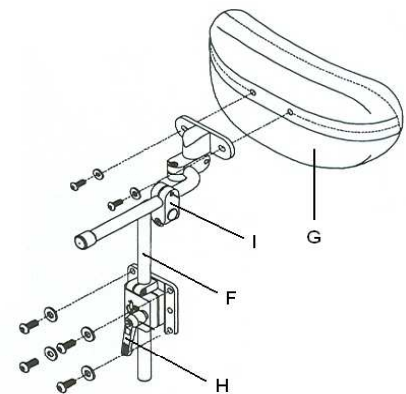


Figure 2

Etape 3: Réglage vertical

Le réglage vertical se fait en desserrant le levier (H) et en couissant la barre verticale jusqu'à la hauteur souhaitée (Figure 2). Il suffit de desserrer le levier, il n'est pas nécessaire de le retirer entièrement.

Etape 4: Réglage horizontal

Le réglage horizontal se fait en desserrant les vis (I) et en couissant la barre horizontale jusqu'à la hauteur souhaitée (Figure 2). Il suffit de desserrer les vis, il n'est pas nécessaire de les retirer entièrement.

Compatibilité	Maintenance	Formation
Ce produit est compatible avec le dossier Pro-tech et une large gamme d'autres systèmes, nous nous ferons un plaisir de vous renseigner sur l'utilisation appropriée.	Toutes les fixations doivent être contrôlées au moins une fois tous les trois mois au niveau de la tension et pour repérer tout signe de dommage pouvant affecter leur fonctionnalité.	Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire pour le montage du matériel Pro-tech ou de plus ample renseignements sur l'utilisation de ce produit, n'hésitez pas à prendre contact avec Invacare.