

GUIDE DE MONTAGE



& APPUIS-TÊTE MATRX ELAN



Yes, you can.®

LES CEINTURES



Ceinture 2 points
HB205/HB235



Ceinture 2 points
HB216



Ceinture 2 points
HB219



Ceinture Evoflex
EB225/EB235



Ceinture 4 points
HB405/HB435

FIXATIONS *(sauf evoflex)*



Flat-mount

*Uniquement en option
montée sur les fauteuils
et ceinture HB205*



Cinch-mount

*Sur les ceintures en
accessoires*

MONTAGE SUR LES FAUTEUILS

Küschall® à cadre pliant

Colliers de fixation
pour tube Ø 25 mm

HW320-25-2



Küschall® à cadre rigide

Platines universelles
(toiles d'assise vissées)

HW200-90-2 (à 90°)

HW200-20-2 (à 20°)



Ou option montée :

Option DK*7810

Option DK*7820

Option DK*7830

Gamme Action® *(sauf Action®5)*

Colliers de fixation
pour tube Ø 22 mm



HW303-B-2



Action® 5

Fixation de ceinture
pour Action®5

SP1601541

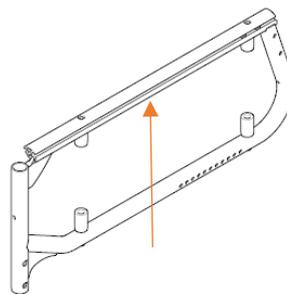
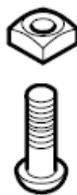


A fixer sur le rail
situé sous le tube
de la toile d'assise

Rea® Azalea

Kit d'attaches pour ceinture
de positionnement

Option BN*1310

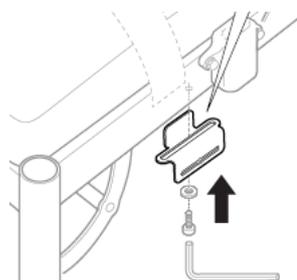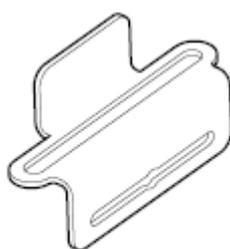

Rea® Dahlia®

Points d'accroche intégrés
au châssis



Fauteuils roulants électriques – Assises Modulite™ et Ultra Low Maxx™

Inserts M6 pour fixation sur
rail

HKA10-1



Pour une **ceinture 4 points**, prendre deux kits d'inserts M6 (HKA10-1)
ou ajouter des colliers de fixations Ø 22 mm (HW303-B-2), à fixer sur les
tubes de dossier – selon positionnement établi.

LES HARNAIS

STAYFLEX



PIVOTFIT



TRIMLINE



MONOFLEX



FIXATIONS



Cinch-mount

SANGLES

Les sangles sont interchangeables à tout moment pour passer d'un réglage vers l'avant ou vers l'arrière.



Réglage vers l'avant

Réglage vers l'arrière

MONTAGE SUR LES FAUTEUILS (STAYFLEX, PIVOTFIT, TRIMLINE)

Pour les sangles basses des harnais Stayflex, Pivotfit et Trimline, se référer aux ceintures 2 points.

Küschall®

Avec dossier **Matrx Elite**

Kit support harnais **Matrx Elite**

1580359



Avec dossier **Matrx Elite E2**

Interface pour harnais **Matrx Elite E2**

1632757 (largeurs 36 et 38 cm)

1632758 (largeurs 41 à 51 cm)




Gamme Action®

Avec appui-tête **Invacare®**

Attache pour harnais pour appui-tête **Invacare®**

SP1559963

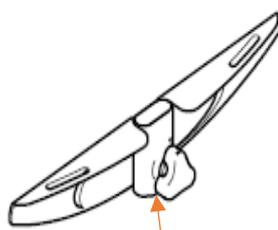


A glisser entre l'appui-tête et la fixation d'appui-tête

Sur barre de tension

Rea® Azalea®

Attache pour harnais

Option BN*1300 ou SP1559963

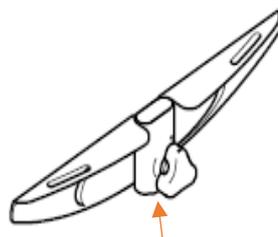


A glisser entre l'appui-tête et la fixation d'appui-tête

Rea® Dahlia®

Attache pour harnais

Option BV*1860 (*Dahlia* 30°) ou BX*1820 ou (*Dahlia* 45°) ou SP1559963

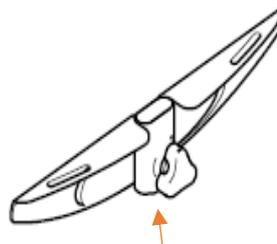

A glisser entre l'appui-tête et la fixation d'appui-tête

Fauteuils roulants électriques – Assises Modulite™ et Ultra Low Maxx™

Avec dossier **Matrix Elite**

Kit support harnais **Matrix Elite**

1580359



Avec dossier **Matrix Elite E2**

Interface pour harnais **Matrix Elite E2**

1632757 (largeurs 36 et 38 cm)

1632758 (largeurs 41 à 51 cm)



Avec dossier **Matrix Posture Back**

Kit support harnais **Matrix Posture Back**


1580358



Avec appui-tête **Invacare®**

Attache pour harnais pour appui-tête **Invacare®**

SP1559963

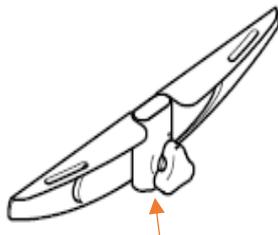


A glisser entre l'appui-tête et la fixation d'appui-tête

MONTAGE SUR LES FAUTEUILS (MONOFLEX)

Fauteuils roulants manuels (tous dossiers) et fauteuils roulants électriques (avec dossiers Matrix)

Colliers de fixation pour tube Ø 25 mm

HW320-25-2

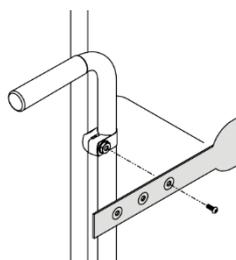

Colliers de fixation pour tube Ø 22 mm

HW303-B-2



NC avec autres dossiers sur fauteuils roulants électriques (réglable en tension, Flex 3)

LES HARNAIS DE JAMBES

Küschall®

Colliers de fixation
pour tube Ø 25 mm

HW320-25-2



Gamme Action® (sauf Action®5)

Colliers de fixation
pour tube Ø 22 mm



HW303-B-2



Action® 5

Fixation de ceinture
pour Action®5

SP1601541

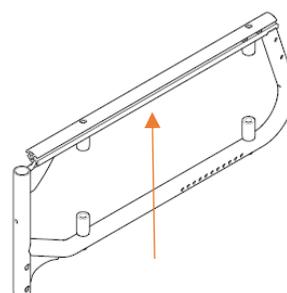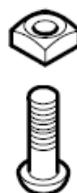

A fixer sur le rail
situé sous le tube
de la toile d'assise


Rea® Azalea

Kit d'attaches pour ceinture
de positionnement

Option BN*1310




Avant du fauteuil

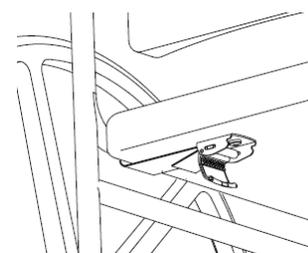

Arrière du fauteuil
ou avant et arrière

Rea® Dahlia®

Points d'accroche intégrés
au châssis

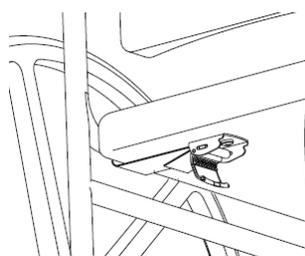

Avant du fauteuil
ou avant et arrière



Arrière du fauteuil

Fauteuils roulants électriques – Assises Modulite™ et Ultra Low Maxx™

Inserts M6 pour fixation sur rail


HKA10-1



LES MAINTIENS DE CHEVILLES

Gamme Action®, Rea®, fauteuils roulants électriques

Percer les palettes et utiliser les fixations livrées de série

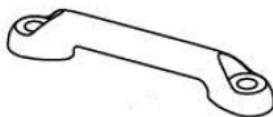

OU

Pour palettes réglables en angle

Attaches pour maintiens de chevilles pour palettes réglables en angle, la paire

1557038



LES APPUIS-TÊTE MATRX[®] ELAN



Standard - 150 mm 150 x 90 mm
Standard - 250 mm 250 x 130 mm
Standard - 360 mm 360 x 130 mm

Références (accessoires) :
1603255/1603294
1603254/1603293
1603253/1603292



Occipital - 230 mm 230 x 180 mm
Occipital - 310 mm 310 x 200 mm

Références (accessoires) :
1603291/1603296
1603290/1603295



4 Points - 280 mm 280 x 260 mm
4 Points - 230 mm 230 x 190 mm

Références (accessoires) :
1626823/1626824
1629822/1629823

SUPPORTS D'APPUIS-TÊTE



MONTAGE

Sur dossiers Matrx[®] Elite

Plaque de fixation

1544188 (largeur de dossier de 46 à 51 cm)
1544187 (largeur de dossier de 33 à 43 cm)

(livrée de série avec le dossier à partir de la largeur 38 cm)



Sur dossiers Matrx[®] Elite E2 & E2 Deep

Plaque de fixation

1632756
(livrée de série avec le dossier)



Sur dossiers Matrix® Posture Back

Pas de fixation nécessaire : la coque du dossier est pré-percée

Sur dossiers Flex®3 rigide

Adaptateur pour dossiers Flex®3 rigide

1603252



Sur dossiers Flex®3 réglable en tension

Adaptateur pour dossiers Flex®3 réglable en tension

1609412



Sur Rea® Clematis® Pro dossier souple

Adaptateur pour dossiers Flex®3 réglable en tension

1609412



Sur dossiers réglables en tension (Dossier A**2171 sur fauteuil roulant électrique en AA2) et pour Gamme Action®

Support d'appui-tête universel

SP1581931

