


# KIT 1530023 - Mise en place sangle Action Vertic

## Matériel nécessaire:

- Sangle de Maintien ①
- Collier de serrage acier 30-40 ②
- Collier de serrage acier 45-60 ③
- 2 Colliers de serrage plastique
- un tournevis plat

- Actionner le vérin de levage du Vertic pour permettre une meilleure accessibilité du vérin.
- Positionner les 3 éléments à monter

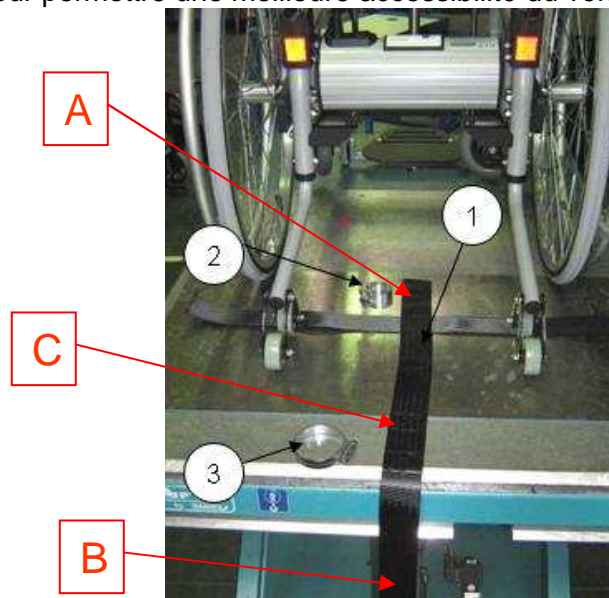

- Couper les colliers plastique de serrage qui maintiennent les câbles d'alimentations sur la partie haute du vérin. Cela permet un meilleur passage de la sangle. Attention de ne pas couper les câbles.
- Faire passer le collier ② dans le passant de la sangle ① au niveau de A.
- Assembler la sangle sur le vérin. Attention à ne pas prendre les câbles.

## KIT 1530023 - Mise en place sangle Action Vertic


- Présenter la sangle en croix au-dessus du vérin



A

Côté  
velcro  
doux

- Faire plonger la sangle entre l'assise et le vérin.

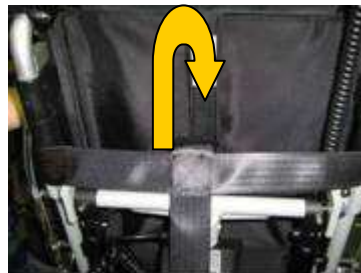

- Pré assembler la ceinture Velcro au niveau du boîtier électronique.



## KIT 1530023 - Mise en place sangle Action Vertic

- Les 2 passants doivent être à la même hauteur. (Ligne)



Partie basse du vérin

- Assembler aux extrémités de celle-ci le collier de serrage ②. Faire passer le collier dans le passant coté **B** de la sangle. Attention la vis de serrage du collier doit être face à soi.
- Le couple de serrage de la vis doit rester raisonnable (4Nm maxi).



- Assembler le collier de serrage ③ sur la partie haute. Faire passer une partie du collier dans le passant de **C** la sangle et l'autre partie à l'extérieur de la sangle
- Attention la vis de serrage du collier doit être face à soi.
- Attention de ne pas prendre les câbles dans le collier de serrage.
- Le couple de serrage de la vis doit rester raisonnable (4Nm maxi).




## KIT 1530023 - Mise en place sangle Action Vertic

- Serrer ces ensembles à l'aide d'un tournevis.

- Fermer en réajustant la ceinture Velcro.

Boîtier électronique

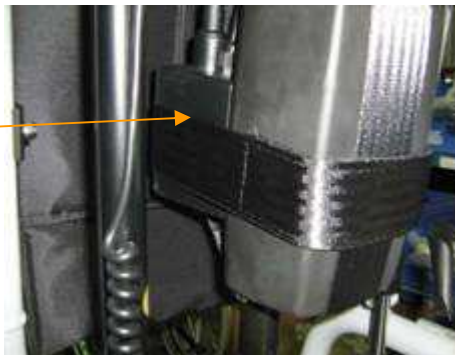

- Remettre un collier de serrage plastique pour maintenir les câbles sur la partie haute.



- Actionner le vérin pour faire redescendre le Vertic.
- Actionner le vérin pour faire remonter le Vertic. Vérifier la bonne tenue de la sangle.