

Barre de poussée Action3 Junior


Nous attirons votre attention sur le risque de déverrouillage de la barre de poussée en soulevant le fauteuil vers le haut. Eviter de soulever le fauteuil par la barre de poussée.

La barre de poussée a été renforcée depuis Octobre 2010 afin d'éviter tout risque de déverrouillage. Le nouveau kit d'installation code : I545634 est disponible. Il est composé de nouvelles poignées de serrage plus résistantes, d'un adaptateur et d'une nouvelle fixation.

INSTALLATION DU KIT

Etape 1 : démontage du kit

- Dévisser les poignées de serrage de la barre de poussée et l'enlever (pièce C)
- Enlever les poignées de serrage M6 (pièce A)
- Enlever les fixations plastiques (pièce B)

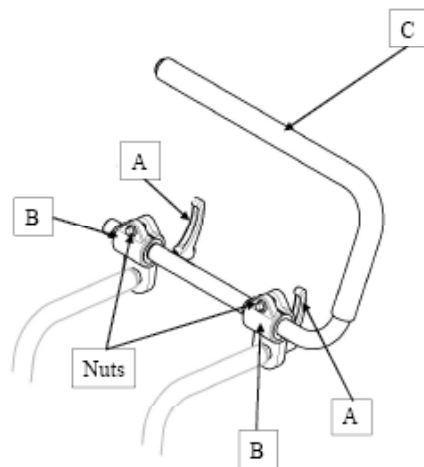

Etape 2 : montage du nouveau kit

- Assembler l'adaptateur M6/M8 à l'aide d'une clé 17 mm (pièce E), en serrant fort (couple de serrage : 10N.m)
- Monter les fixations plastiques (pièce F)
- Monter les poignées de serrage (pièce D)
- Monter la barre de poussée (pièce C)
- Serrer fort les poignées de fixation (pièce D) pour sécuriser la barre de poussée.

