

## Instructions de montage du dispositif de support de pieds et de positionnement du pied et de la cheville Dynaform®



Les dispositifs de positionnement du pied et de la cheville et les supports-pieds Dynaform® sont conçus pour que tous les utilisateurs puissent bénéficier des atouts d'un bon positionnement. Nous nous engageons à fournir le meilleur service possible et si vous le jugez nécessaire à vous fournir une formation supplémentaire pour le montage des dispositifs de positionnement. Ces appareils doivent être mis en place par des personnes qualifiées.

**Outils nécessaires :** clés Allen de 1/8" (3 mm) et 5/32" (4 mm).

Toutes les vis doivent être serrées à 20 in-lb (2,3 N). Lisez attentivement les instructions suivantes avant le montage.

### Etape 1:

Déterminez l'endroit où vous souhaitez positionner le support pieds sur la palette du fauteuil.

### Etape 2: Pour le dispositif de support de pied

Retirez l'appui en mousse (C). Percez deux trous à travers le support de pied (A) et la palette du fauteuil avec un foret de 1/4" (6 mm). Une fois le premier trou percé, placez une vis à tête plate, une rondelle et un écrou pour fixer la palette. Répétez la procédure pour le second trou. (Figure 1) Découpez un morceau de scratch d'environ 10/15 cm et collez le à l'intérieur du support (A) pour maintenir l'appui en mousse (C). Placez l'appui en mousse (C) à l'intérieur du support (A).

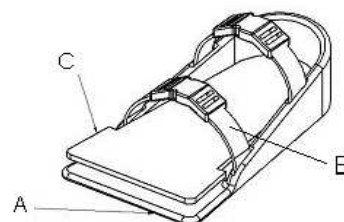


Figure 1

### Etape 3: Pour le dispositif de positionnement du pied et de la cheville Dynaform®

Une fois le bon endroit déterminé, avec un foret de 1/4" (6 mm), percez à travers les trous existants dans la palette du support de pied et dans la palette du fauteuil. Une fois le premier trou percé, placez une vis à tête plate avec rondelle et écrou pour fixer la palette. Répétez la procédure pour le second trou.

Limites d'utilisation	Maintenance	Formation	Entretien
<p>Le produit est compatible avec un grand nombre de fauteuils roulants. Nous nous ferons un plaisir de vous informer sur l'utilisation appropriée. Invacare n'est pas responsable d'une quelconque mauvaise utilisation du dispositif. Nous vous recommandons de consulter des professionnels avant de choisir et d'utiliser nos produits. Ce dispositif ne doit pas remplacer d'autres systèmes de retenue nécessaires au transport.</p>	<p>Toutes les fixations doivent être contrôlées régulièrement au niveau de la tension.</p>	<p>Si vous avez besoin d'une formation supplémentaire pour le montage des produits Pro-tech ou de plus ample renseignements sur l'utilisation de ceux-ci, n'hésitez pas à prendre contact avec Invacare.</p>	<p>Un nettoyage régulier permet de maintenir une bonne hygiène.</p>