




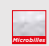







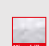

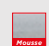



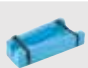



Les coussins *Invacare* **Coussins de positionnement** sont des aides techniques à la posture pour aider à la prévention ou au traitement d'une escarre ou pour corriger ou prévenir une attitude viscieuse.

Composés de différents matériaux de haute qualité et recouvert d'une housse **Dartex**, cette gamme vous permettra de positionner tous types de patients selon sa sensibilité et son risque d'escarres. Il est recommandé d'alterner les postures toutes les 2/3 heures pour éviter les zones d'appui prolongées.

Guide de choix

			Dimensions d'encombrement			Poids	LPPR	Composition
Référence produit	Description	Longueur	Largeur	Hauteur				
Aides techniques à la posture en microbilles								
	PC100B	<i>Invacare</i> coussin universel	600 mm	500 mm	150 mm	0,8 kg	1269224 129,58 €	microbilles 
	PC150B	<i>Invacare</i> Cale Universelle	400 mm	250 mm	80 mm	0,19 kg	1269224 129,58 €	microbilles 
	PC200B	<i>Invacare</i> Bouée	470 mm	380 mm	Ø 140 mm	0,5 kg	1269224 129,58 €	microbilles 
	PC300B	<i>Invacare</i> Décubitus	2000 mm		Ø 180 mm	1,1 kg	1220471 173,79 €	microbilles 
	PC400B	<i>Invacare</i> Demi-lune	880 mm	880 mm	Ø 200 mm	1,6 kg	1220471 173,79 €	microbilles 
	PC600B	<i>Invacare</i> Demi-Décubitus	700 mm		Ø 150 mm	0,4 kg	1269224 129,58 €	microbilles 
	PC700B	<i>Invacare</i> Trapèze de positionnement	500 mm	130 mm	250 mm	0,36 kg	1269224 129,58 €	microbilles 
Aides techniques à la posture en mousse / gel								
	OSW100/ BALT	<i>Invacare</i> Cale de plicature	850 mm	570 mm	110 mm	1,5 kg	1220471 173,79 €	Mousse HR 40 kg/m ³ 
	HP50 HP100	<i>Invacare</i> Cale talon	480 mm	320 mm 620 mm	50 mm	1,5 kg 3 kg	1269224 129,58 €	Mousse HR 40 kg/m ³  + insert de gel 
	MLT/S MLT/M MLT/L	<i>Invacare</i> Talonnère	510 mm 610 mm 660 mm		115 mm	0,7 kg 0,75 kg 0,8 kg	1269224 129,58 €	Mousse HR 40 kg/m ³ 

Les matériaux

Large choix de coussins dans différentes matières pour répondre à tous les besoins.



Microbilles

Microbilles

Polystyrène expansé très facile à manipuler, très léger. Pour une mise en posture courte.



Mousse

Mousse HR

Très confortable. Positionnement stable.



Gel

Gel fluide

Favorise l'immersion dans le support.

Les Aides Techniques à la Posture



Décubitus

- Idéal pour mise en position semi-latérale 30° en position allongée pour assurer une décharge totale du sacrum en cas d'escarre déclarée.
- Permet de positionner le patient avec soutien de la tête jusqu'aux genoux pour libérer les points d'appui au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.



Demi-lune

- Prévient les risques de chute de lit.
- Assure un bon maintien au niveau de la tête et des coudes.
- Utilisation combinée avec cale plicature et cales talons pour assurer une alternative aux lits médicalisés.



Cale Plicature

- Recommandé par les experts pour assurer une décharge au niveau des talons dans le cadre de la prévention des escarres.
- Limite les effets de glissement vers le pied de lit et donc limite les effets de friction et cisaillement.
- Alternative à l'utilisation de lits médicalisés.



Cale universelle

- Utilisation au niveau des mollets pour décharge talonnière et au niveau des coudes pour mise en décharge
- Composition : microbilles
- Soulagement des points d'appui et positionnement du bassin en fauteuil roulant



Cale talon

- Immersion des zones à risque dans le gel, des talons et des coudes pour augmenter la zone de contact et limiter les points d'appuis dans le cadre de la prévention des escarres.
- Favorise le retour veineux car légère inclinaison du coussin.



Coussin universel

- Maintien de la tête.
- Utilisation au niveau des mollets pour décharge talonnière.
- Utilisation au niveau des coudes pour mise en décharge.



Trapèze de positionnement

- Cale de plicature pour les genoux
- Cale de positionnement multi-positions
- Dispositif microbilles permettant de positionner une personne allongée à 30° d'inclinaison latérale



Bouée

- Maintien au niveau de la tête pour soulager les lombaires.
- Décharge au niveau du sacrum.
- Utilisation combinée avec le coussin demi-décubitus pour réduire les appuis exercés au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.



Demi-décubitus

- Décharge du talon.
- Utilisation combinée avec le coussin bouée pour réduire les appuis exercés au niveau des condyles fémoraux et des malléoles internes.
- Maintien de la tête.
- Position semi-latérale 30° en position allongée pour les personnes de petite taille.



Talonnière

- Décharge totale du talon.
- Mise en proclive modérée de la jambe pour favoriser le retour veineux.
- Bon maintien de la jambe grâce aux 2 sangles.
- Limite le risque de luxation en cas de prothèse de hanche.

Les positionnements

Positionnement en DECUBITUS DORSAL

Prévention des escarres talonnières et au niveau du sacrum, des ischions, des coudes et de l'occiput.




Exemples




Positionnement SEMI-FOWLER

- Prévention des escarres talonnières et au niveau des coudes.
- Particulièrement recommandé sur un lit dépourvu de la fonction plicature.
- Posture réalisée en relevant le dossier du lit à 30°.

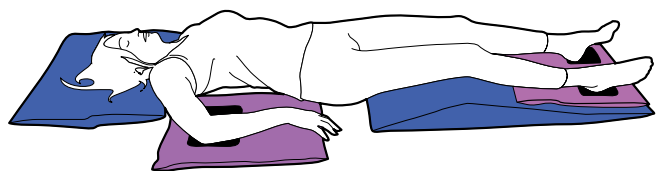

Semi-Fowler 30° - 30°


Exemples

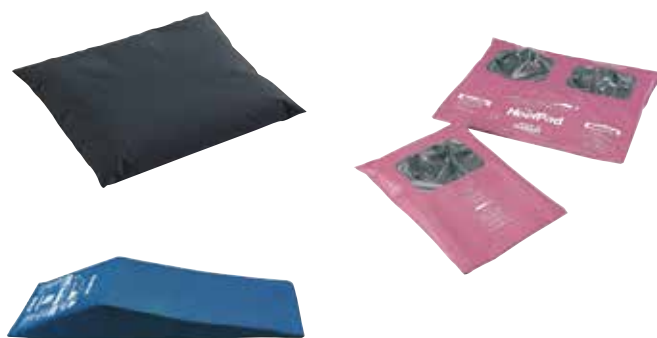

Les positionnements

Positionnement DECUBITUS SEMI LATERAL à 30°

- Prévention des escarres sacrées (sacrum, trochanters) en reportant les pressions sur des zones à moindre risque (bassin)
- Soutien de la cuisse du côté surélevé, évitement de la zone du sacrum

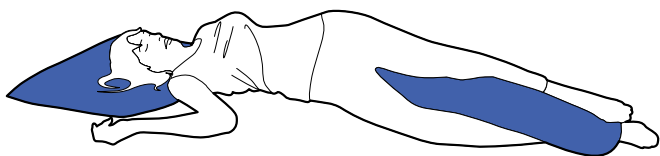

Exemples



Positionnement DECUBITUS SEMI VENTRAL à 135°



Exemples



Prescription



Prescription – Renouvellement annuel

1220471

Mr ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin Invacare X de série de positionnement, standard, des hanches et des genoux.

1269224

Mr ou Mme X nécessite la délivrance d'un coussin Invacare X de série de positionnement, modulaire, Base du coussin modulaire.

Entretien quotidien

Utilisation de lingettes avec détergents habituels pour nettoyage quotidien.

Normes :

EN NF 597 parties 1 et 2: Résistance au feu

ISO 1420: Test de la colonne d'eau

EN NF 10993-5: Biocompatibilité