

1. Type de moteur

- Robin (déplacement manuel)
- Robin Mover (déplacement électrique)

2. Lieu souhaité de l'implantation

- Domicile Collectivité

3. Les besoins et le type de transfert

- Rails droits (préconisés pour les transferts lit-fauteuil)
- Rails avec courbes [Attention installation sur plafond uniquement]
- Rails en traverses en H (préconisé pour un transfert à partir de n'importe quel point de la pièce)
- Autre montage à préciser (aiguillage, passage de porte ...) [Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de votre responsable régional Diffusion]



4. Type de fixation et nature du support

- Si fixation au plafond préciser la nature du plafond
 - Dalle béton *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
 - Hourdis béton *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
 - Charpente bois [attention possibilités de montages limitées et nécessite d'un accès facile aux combles – Non compatible avec la norme RT2012]
 - Faux plafond suspendu avec dalles amovibles [74cm maximum entre plafond béton et dalles amovibles]
 - Autre à préciser :
[Nous vous conseillons de vous renseigner auprès de notre service client]
- Si fixation aux murs préciser la nature du mur
 - Mur en parpaings *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
 - Mur en briques *non recouvert d'une plaque d'isolant > à 8 cm*
- Si fixation aux murs et au sol (murs recouverts d'isolant ou cloisons non porteuses)
[Attention le support doit pouvoir s'appuyer jusqu'au sol (Pas de baignoire ou placards...)]
 - Préciser la hauteur du plafond
 - Préciser la présence de plinthes

5. **Présence obligatoire d'une prise électrique à proximité du rail pour l'alimentation du chargeur**


6. **Faire un plan avec dimensions de la pièce à couvrir et l'implantation du rail souhaité**
(Si plusieurs pièces à couvrir. Veuillez remplir une check list par pièce)

Joindre des photos du plafond et des quatre murs ou une vidéo à 360° de la pièce à votre demande de devis. Afin de pouvoir déceler d'éventuelles impossibilités d'installation.

Si impossible préciser le motif

7. Installation

- Par vos soins conformément au manuel d'installation
http://www.invacare.fr/sites/fr/files/product_documents/ef73e1de497c7bbd1bd1609d26f45d4f4f1f77ce_FR_SM_SYSTEMEDERAILSROBIN.pdf

- Par Invacare avec garantie décennale
 - (Préciser le lieu de montage)
 -  Le lieu de montage et la pièce devant recevoir le rail doivent être facilement accessible et disposer d'une alimentation électrique.