

ALL-ROUND JOYSTICK



ALL-ROUND JOYSTICK

Le **All-round Joystick** est une version compacte du joystick standard pour fauteuils roulants électroniques. Comme son nom le suggère, ce joystick est conçu pour une utilisation "all-round" (polyvalente) et est donc adapté à la majorité des utilisateurs de fauteuils roulants. Il peut être utilisé en tant que joystick standard, joystick pour conduite à l'aide du menton ou joystick pour tierce personne.

P002-71	Utilisation "all-round" (polyvalente)	avec 2 entrées jack pour contacteurs
	Dimensions: 110 x 66 x 60 mm (4.33 x 2.60 x 2.36 po)	
	Force musculaire requise: 250 g (8.82 oz)	



Description de produit



Ce joystick complètement proportionnel avec amplitude et force musculaire requise standard (250 g/8.82 oz) a un boîtier compact (110 x 66 x 60 mm ou 2.60 x 2.36 et 4.33 po) et 2 entrées jack pour contacteurs. Ceci permet de connecter directement 1 ou 2 contacteurs satellites par entrées intégrées (1 pour fonction on/off et 1 pour fiche mode).

Dans le boîtier du joystick on a intégré l'interface avec son électronique sophistiquée: cette électronique permet d'adapter le joystick aux capacités et besoins individuels.

Les paramètres peuvent être réglés par le logiciel mo-Vis Configurator, un logiciel librement téléchargeable. Via un câble USB, branché directement de l'interface sur l'ordinateur, vous pouvez établir la connexion au PC pour configurer le joystick ou effectuer un diagnostic (mini port USB).

Le joystick "All-round" est pourvu de 4 trous filetés pour le monter directement sur un surface plate. Pour une installation plus flexible vous pouvez utiliser les pièces de montage séparées (plaque de montage et tiges Q2M).

Le All-round Joystick est compatible Omni (Connecteur Pin SUB D9). Pour les autres versions, un câble interface séparé sera nécessaire. Contactez-nous pour plus d'informations.

Grâce à son design et ses caractéristiques, le Joystick "All-Round" est une solution particulièrement adaptée aux personnes ayant une mobilité limitée ou à leur compagnon pour contrôler leur fauteuil roulant électrique.

Ergonomie, flexibilité, fonctionnalité, discrétion et élégance sont des caractéristiques très importantes de tous les produits mo-Vis.



mo-Vis

mo-Vis signifie "se déplacer avec une Vision"! Après tout, nous voulons toujours aller de l'avant et toujours faire mieux. Nous faisons "bouger" les personnes dans notre entourage, des personnes avec ou sans limites. Notre but est de vous emmener sur notre chemin! Tous nos produits suivent cette "vision". Non seulement la fonctionnalité, la flexibilité et l'ergonomie sont importantes, mais également la discrétion et l'élégance.



contact

Questions sur le All-round Joystick?
N'hésitez pas à nous contacter
par email info@mo-vis.com
ou par téléphone +32 9 335 28 60.



mo-Vis bvba

Biebuyckstraat 15 D, 9850 Nevele, Belgique
info@mo-vis.com | www.mo-vis.com | +32 9 335 28 60